


小柄な方にも使いやすい超コンパクト・ティルト&リクライニング車椅子

マイチルト-ミニ3D

MH-SR 【標準価格】¥198,000(非課税)
*スイングアウトのみ TAISコード:00066-000349

MH-SR-SE 【標準価格】¥214,000(非課税)
*スイングアウト&エレベーター仕様 TAISコード:00066-000350

●小柄な女性がしっかり深く座れる
「短い座シート奥行(35cm)」

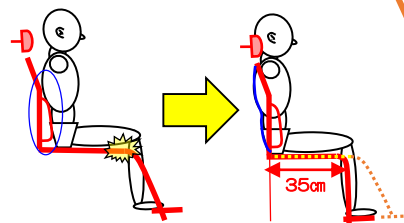

【座シートが長い】
膝の裏と座シートが当たり、奥まで座れない。

【座シートが短い】
しっかり奥まで座ることができ、すべり座りのリスクも減らせます。

●極限まで手前に引き込んだ
「直下構造のフットサポート」
(前後・角度調整式)



「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにしっかりと足を乗せることができます。


※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。

●低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能
「スネークヘッドサポート」




小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、従来よりも低い位置からの設定が可能です。また、前後・左右・角度を一度に合わせられる新しい構造を採用しました。

●円背の方の安定座位をサポートする
「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)

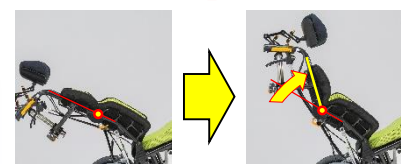

オアシス-ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭へ首の安定にもつながりやすくなり、食事が取りやすくなるのが期待できます。


●ハイブリッドタイヤ仕様
*ノーパンクタイヤ標準装備

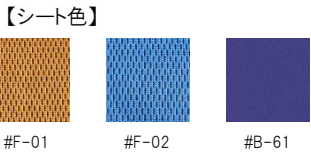

従来品
マイナス10.5cm


従来の車いすとの姿勢の比較

マイチルト
(座シート奥行40cm)

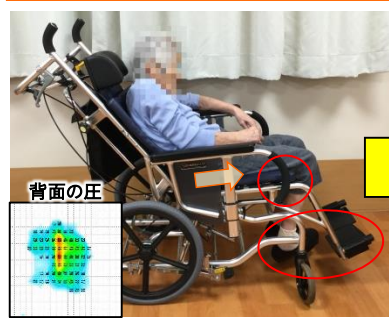

座シートが長すぎる、膝関節が拘縮で伸ばせないためフットサポートに足が乗らない。⇒すべり座りになってしまっている。

マイチルト・コンパクト3D
(座シート奥行38cm)

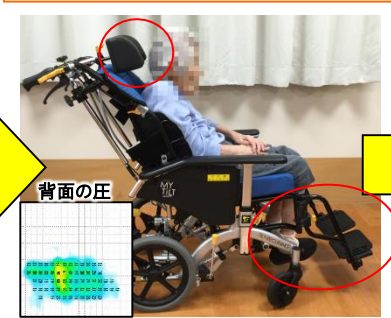

座シート奥行は多少良くなったが、枕の位置が高すぎる、フットサポートにもやはり足が乗らない。

マイチルト・ミニ3D
(座シート奥行35cm)




ポジティブ機能で背中をしっかり合わせることができ、直下構造のフットサポートにより、フットサポートに足がしっかりと乗っている。

You Tubeで
シーティング例
動画を配信中。



「室内での移動」にも徹底的にこだわった 超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす

業界でもっともコンパクトなティルト&リクライニング車いす！

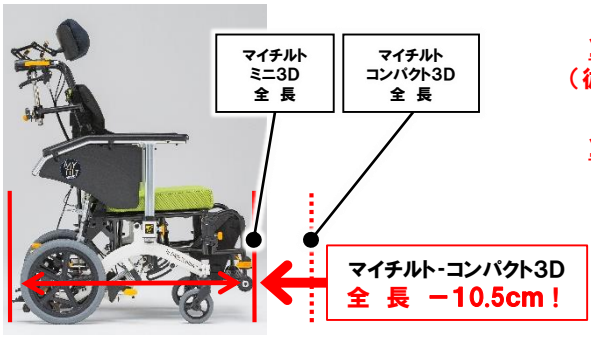

全長: 89cm
(従来品 -10.5cm)

全幅: 53cm
(従来品同等)




ティルト&リクライニング車いすとして、業界でもっともコンパクトな全長89cmです。
全長が短いので、廊下のコーナーがもっとも曲がりやすいティルト&リクライニング車いすです。80cm幅の廊下のコーナーを曲がるのが可能です。リクライニング車いすは大きすぎて使えない、そんな悩みを解消してくれる車いすです。

狭いスペースもさらに使いやすい！リフトアップ機構付きモデル！


MH-SRL 【標準価格】¥218,000(非課税)
*リフトアップ機能付き
*スイングアウトのみ
TAISコード:00066-000351

MH-SRL-SE 【標準価格】¥234,000(非課税)
*リフトアップ機能付き
*スイングアウト&エレベータリング仕様
TAISコード:00066-000352


【マイチルト-ミニ3D リフトアップ時】

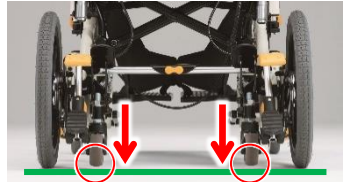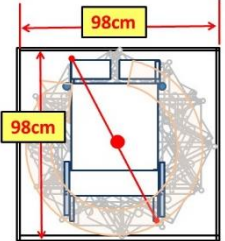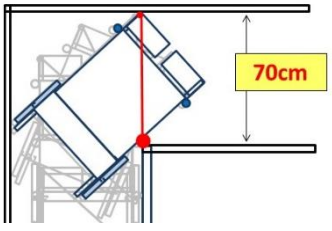

リフトアップキャストを下げると車輪が浮き上がります。

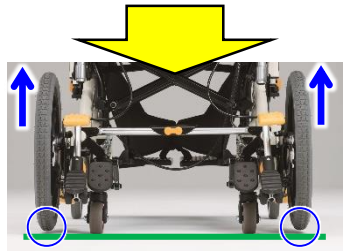

真横への移動、その場での旋回が可能になります！

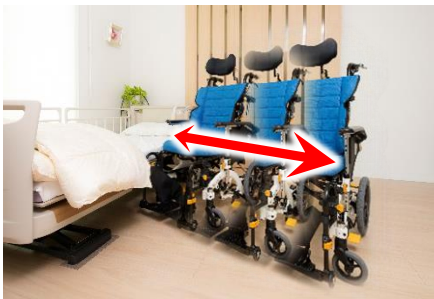

You Tubeで
室内の使用例
動画を配信中。

リフトアップ仕様で廊下幅70cmのコーナーも曲がれます(マイチルト-コンパクト3Dは廊下幅90cmのコーナーが曲がれます)。直径98cmで旋回可能で狭いスペースでの移動も楽々です。真横への移動も可能になるので、移乗時のベッドへの横付けも楽に行えます。
*移乗時は、リフトアップ機能を解除して必ずブレーキをかけてください。

●マイチルト-ミニ3Dサイズ表 (単位: mm)

品番	シート幅	座面高	アームサポート高さ	バックサポート高さ	フットサポート長	シート奥行	全高	全長	全幅	重量(kg)
MH-SR	400	410	0・140~300	480	260~350	350	1010	890	530	24.7kg
MH-SR-SE	400	410	0・140~300	480	260~350	350	1010	880	530	26.5kg
MH-SRL	400	410	0・140~300	480	260~350	350	1010	890	530	27.0kg
MH-SRL-SE	400	410	0・140~300	480	260~350	350	1010	880	530	29.0kg

お問い合わせ先



株式会社 松永製作所
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL http://www.matsunaga-w.co.jp