

その場で、『くるり』！ 圧倒的な小回り性能！

【6輪車椅子】ネクストコア-くるり

圧倒的に短い全長86cmと最小回転半径48cmの6輪車椅子！！

ネクストコア-くるり 標準価格 ¥164,000(非課税)

【中床タイプ・自走式】

NEXT-71B

前座高 43/41cm
キャスタ*大車輪 4*22*4
TAISコード:00066-000333

【中床タイプ・介助式】

NEXT-81B

前座高 43cm
キャスタ*大車輪 4*16*4
TAISコード:00066-000334

【低床タイプ・自走式】

NEXT-70B

前座高 40.5/38.5/36.5cm
キャスタ*大車輪 4*20*4
TAISコード:00066-000335

【低床タイプ・介助式】

NEXT-80B

前座高 40/38/36cm
キャスタ*大車輪 4*12*4
TAISコード:00066-000336



機種名	座幅	前座高	後座高	座奥行	肘高さ	背高さ	フット長	全長	全幅	重量
NEXT-71B	40	43	40.5	36	22.5~28.5	46	29.5~	86	58	19.0kg
NEXT-70B	40	40.5	38	36	22.5~28.5	46	29.5~	86	58	18.5kg
NEXT-81B	40	43	40.5	36	22.5~28.5	46	29.5~	86	58	18.0kg
NEXT-80B	40	40	37.5	36	22.5~28.5	46	29.5~	86	58	17.2kg

*出荷時の座面高の設定は表の仕様になります。

全長86cm、『コンパクトモード』でさらに全長83cm！

最小回転半径48cm！ 90cm幅の廊下をその場で“くるり”と回転！

【コンパクトモード】

グリップを内側に収納して、コンパクトモードに設定！全長86cmから驚異の83cmと超コンパクト！



【円盤バンパー】

コンパクトモードとの併用で、前輪と後輪のキャスタの円盤バンパーが壁に傷をつけないくします。



【ネクストコア-くるり】

グリップは収納。円盤バンパーでセーフ！

壁についたグリップとステップの傷

全長86cm。コンパクトモードで、さらに全長83cm。最小回転半径48cm。さらに、前後の4つのキャスタについての円盤バンパーで、旋回時にグリップとステップで壁を傷つけにくくなりました。


【従来の6輪車椅子】

最小回転半径 55cm
全長 98.5cm

【ネクストコア-くるり】


最小回転半径 48cm
全長 86cm
コンパクトモード 83cm

【従来の6輪車椅子】

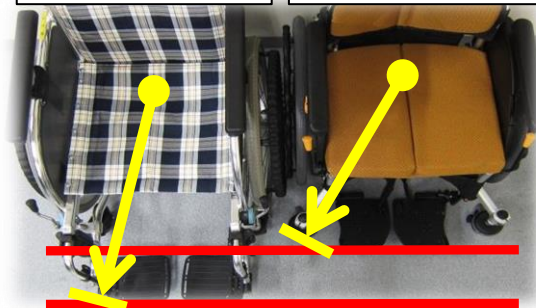


ネクストコア-くるり で、『さらば、ヒヤリ・ハツと！』 前方への転倒を防ぐ、安全・安心の新設計！

従来の6輪車椅子

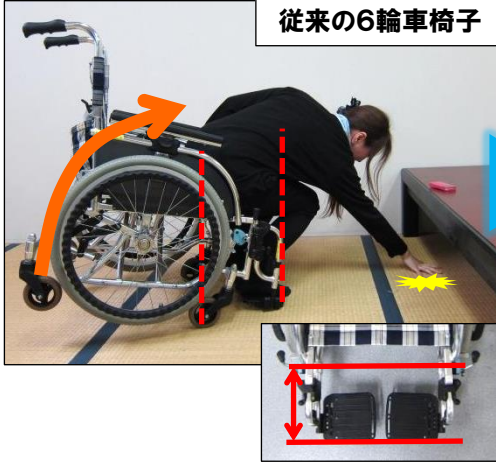

ネクストコア
くるり

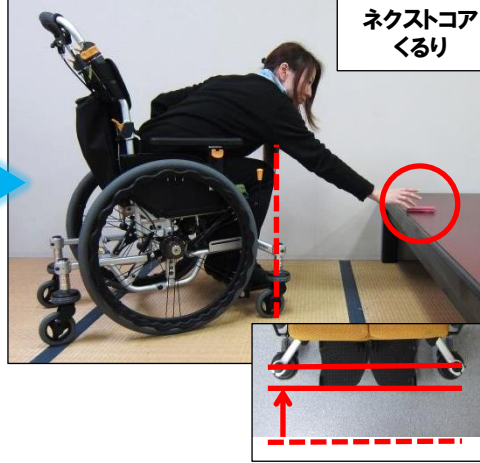

従来の車椅子と比べ、ステップとキャストが近い位置に設計しております。前方の物を取ろうとして重心を前方に移したり、誤ってステップの上で立ち上がったとしても転倒しにくい安心・安全設計の車椅子です。

ベッドへ近づきやすい安心の新設計！

従来の6輪車椅子



ネクストコア-くるり



ステップ・フットサポートのフレームの出っ張りがないので、スイングアウトや着脱しなくてもベッドに接近でき、安全に乗り移りしやすい車椅子です。

緊急避難切替レバーで段差も乗り越え！

【室内モード】
のり越え ×



【屋外モード】
のり越え ○




緊急避難切替レバー

屋外モードで、15cmの段差も乗り越え可能。火事・地震などの緊急避難が必要なときも、屋外へ持ち出すことができます。

足を引いて姿勢をおこしやすい新設計！

従来の6輪車椅子より、ステップの位置を11.5cmも手前に設定しました。ステップの位置が手前にあることで、足を引いて骨盤をを起こして座りやすくなり、すべり座りを防ぎます。

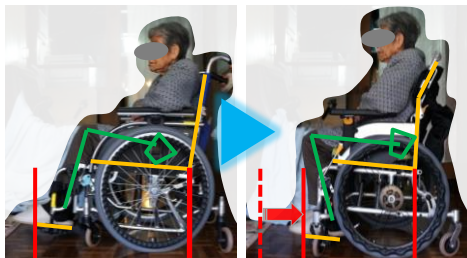

3D立体スリングシートで姿勢が変わる！

背パイプ上部後方曲げと張りベルトを調整することで、背中中の凸部分を大きく緩めることができます。

前方へ倒れてしまう円背の方も、ゆったりと座りやすい背もたれ形状の車椅子です。



お問い合わせ先

製造元
愛の輪
愛のいす



MATSUNAGA

株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>