


MH-VR専用ポンベ架取扱説明書

この度はポンベ架をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
また、大切に保管し必要に応じてお読みください。

構成部品

| 部品 | 個数 |
|--------------|----|
| ①本体 | 1 |
| ②ベルト | 1 |
| ③クランプ金具 | 1 |
| ④六角レンチ (5mm) | 1 |
| ⑤取扱説明書 | 1 |

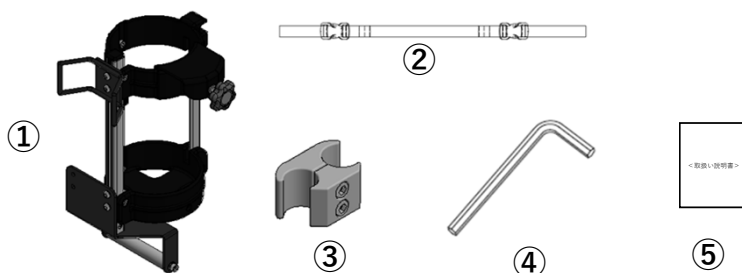

取付け前に

取付けは平坦で安全な場所で行ってください。
必ずブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で行ってください。

使用する工具

同梱されている工具をご使用ください。

注意

- ポンベ架には10kg以上の物は搭載しないでください。
- ポンベ以外の物は搭載しないでください
- 本製品は指定された車椅子以外には取付けしないでください。

①ベルトの取付け。

ベルトで、車椅子のヘッドサポート取り付け部にポンベ架を吊るします。

※ポンベ架が、この画像のような角度になるようにベルトの長さを調整してください。

ポンベ架本体にベルトを通し、左右のヘッドサポート取付部に巻き付けて、バックルで固定します。バックルは「パチン」と音が鳴るまでしっかり入れてください。

(バックルは左右にあります。)



ヘッドサポート取付部に吊るしてください。

ベルトの長さを調整できます。
※ティルト、リクライニングは起こした状態で調整してください。
※たるませる・・・ポンベ架が傾きます。
張る・・・ポンベ架が起き上がります。

「パチン」と音がするまでしっかり入れてください。

②車椅子に取り付けます。

クランプ金具でポンベ架下部の丸棒と車椅子のフレームパイプを挟んでください。ボルトでしっかりと固定します。



※取付後は、ポンベ架をゆすってしっかりと固定されているか、外れたりしないか確認してからご使用ください。

- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。