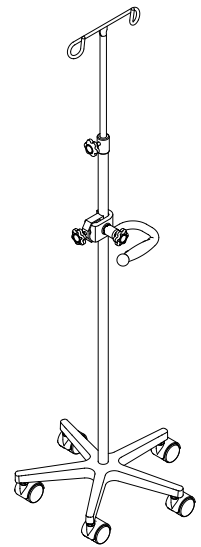


# MRI 用ガートル架組み立て説明書

この度は、MRI 用ガートル架をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
正しく、安全に製品を組み立てていただくために、この説明書をよくお読みください。  
取り扱い方法につきましては、同梱の取扱説明書をよくお読みください。



## 該当機種

- MRI 用ガートル架 (MR-IG-3TMG)

## 構成部品・必要工具

下記の部品・工具が同梱されているかご確認ください。

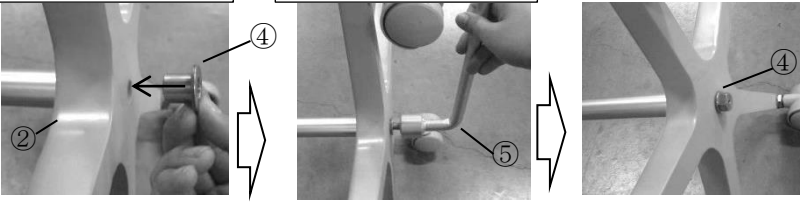
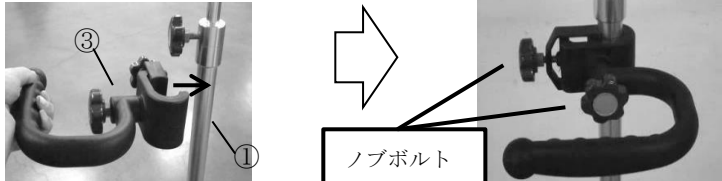
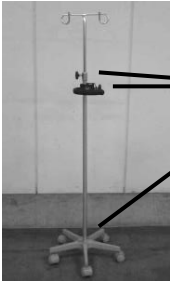

No.	①	②	③	④	⑤
品名	ガートル部	ベース	グリップ部	ボルトセット	専用 ボックスレンチ
数量	1 式	1 個	1 式	1 式	1 本
外観					

※電動工具は使用しないでください（ガートル架が磁化、または破損する恐れがあります）。

## 取付け前に

- 組み立ては平坦な場所で行ってください。

## 組み立て方法

<p>1. ベース(②)にガードル部(①)を差して、裏からカラー(④)をはめ、ボルト(④)で固定します(目安トルク: 12N)。 ※付属の専用ボックスレンチ(⑤)をご使用ください。</p>	<p>カラーを穴にはめる</p> <p>ボルトを入れ、締める</p> 
<p>2. 左図のようにグリップ部(③)をベースパイプ(①)にはめ、各ノブボルト(③)をしっかり締め固定します。 ※あらかじめ高さ調整ノブボルト(③)を緩めておくと取り付けがスムーズです。</p>	<p>ベースパイプにグリップ部をはめる</p> <p>各ノブボルトをしっかり締める</p> <p>ノブボルト</p> 
<p>3. 完成したガードル架に、各所ガタツキ、緩みがないことを確認してください。</p>	<p>ガタツキ 無きこと</p> 
<p>4. 使用者に合わせてグリップの高さ、角度を調整して下さい。(詳細は別紙 MRI 用取扱説明書 14 ページをご覧ください。)</p>	<p>高さ調整</p> <p>角度調整</p> 



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、損害を追う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 誤った組み立て方をされますと、ガードル架の破損やケガの原因となりますので、必ず本書の方法で組み立てを行ってください。
- ご不明な点につきましては、お買い求めの販売店または、(株)松永製作所までお問い合わせください。