


# チェア一型担架 取扱説明書

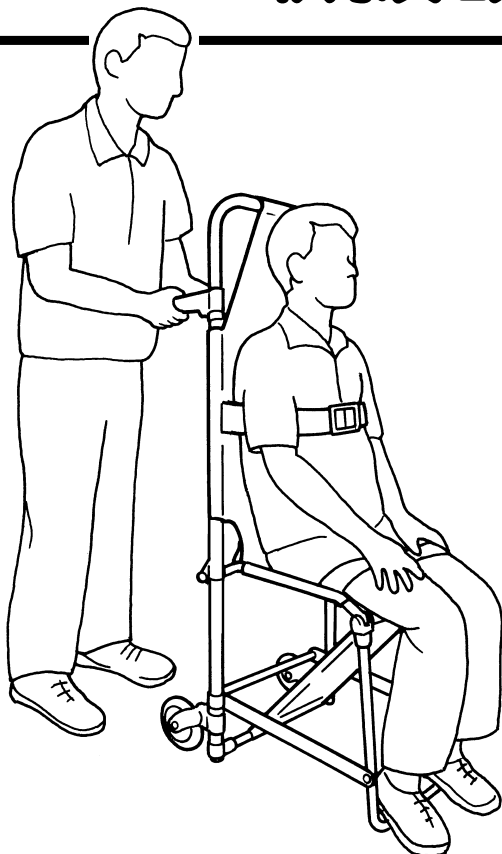

## 保存用

必ず保管しておいてください。

このたびは松永製作所チェア一型担架をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書には、お客様が安全に正しくご使用していただくために必要な注意事項や正しい使い方が説明されています。ご使用になる前に、必ずお読みください。以後は大切に保管してください。

## 目次

1. 各部名称	1
2. ご使用まえに	1
3. ご使用方法及び操作方法	2
4. 安全上のご注意	3～4
5. 3ヶ月に一度の定期点検	5
6. 仕様	5
7. お手入れのしかた	5
8. 保証	6
9. アフターサービス	6

製造元




株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484  
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270  
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

# 1. 各部名称

## チェア型担架

- A. 背フレーム
- B. 座フレーム
- C. 足フレーム
- D. グリップ
- E. キャスター
- F. ロック
- G. ベルト
- H. フラットバー
- I. 背シート
- J. 座シート
- K. レッグシート

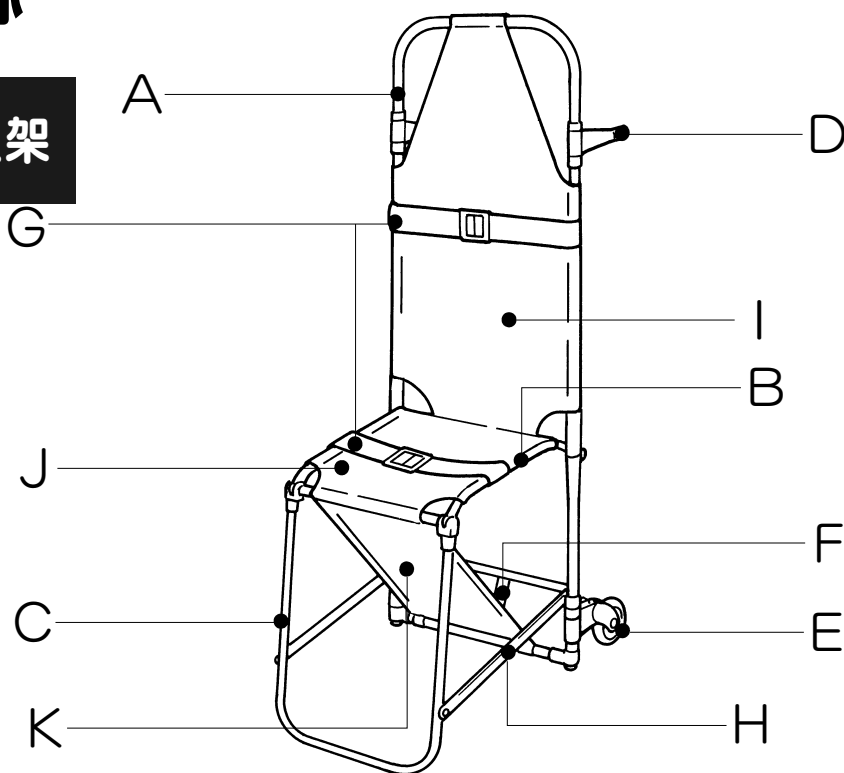

## 2. ご使用まえに

出荷時には検査をしていますが、ご使用前に製品の確認をしてください。

破損していたり濡れたりしていないか、AからKまで各部の破損またキズやねじれはないか、ボルトやナットの脱落はないか点検してください。

異状がある場合は販売店または弊社にご連絡ください。

### 注意


安全のため、操作は2人以上で行なってください。

# 3. ご使用方法及び操作方法


## 警告

ジョイント部分及びフラットバー④と足フレームパイプ⑤の間に、手や指などを入れないでください。  
◇押しつぶされてケガの原因になります。

### 【椅子担架にする場合】

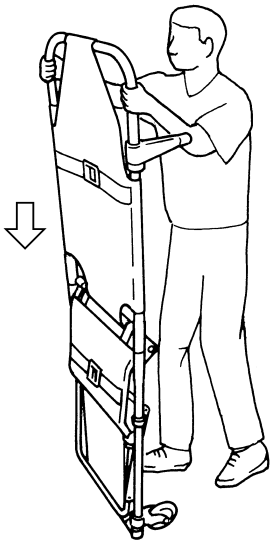

1. 左図の姿勢で、両手で背フレーム④を握って片足でフレーム外枠、下部を固定して一番下まで押し込んでください。ロック⑥をしてください。

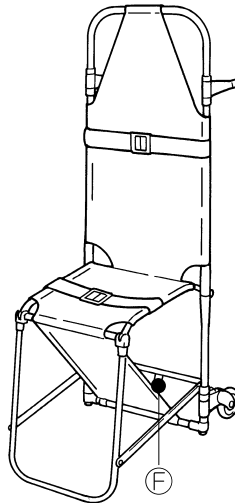


2. 椅子担架から平担架にするには、ロック⑥をはずし片足でフレーム外枠下部を押さえて背フレーム④を上を持ち上げてください。

### 注意

椅子担架にした場合は必ずロック⑥をしてください。

### 【固定完了状態】

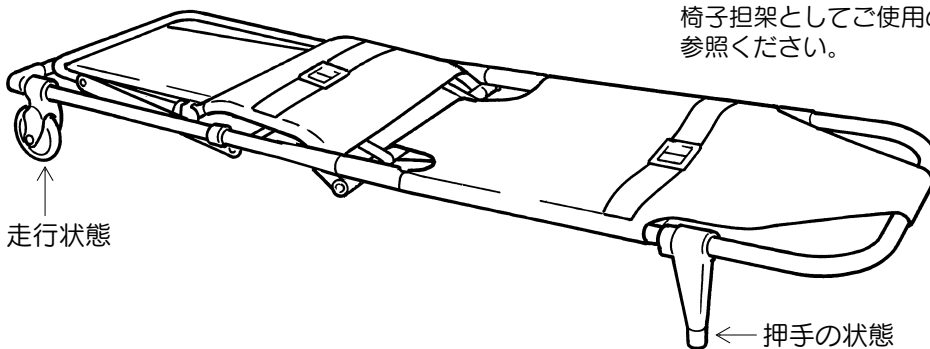


3. 下図の状態になったら平担架として使用してください。  
椅子担架としてご使用の場合は上図をご参照ください。

## 注意

ロックキーが溝に入っていることを必ず確認してください。  
固定されていないと転落転倒の原因になります。

## 4. 安全上のご注意 必ずお守りください

椅子担架

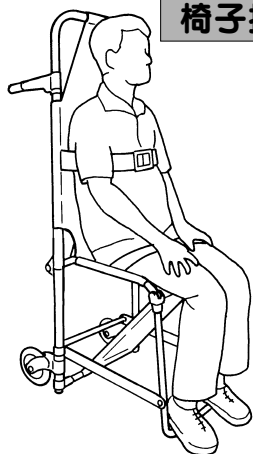


### 【シートベルト】

1.

平担架、椅子担架でご使用の場合には、上、下のシートベルトを必ず締めて体を固定してください。

平担架

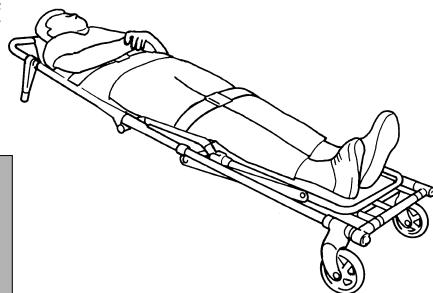

### ⚠️ 注意

乗降の場合は、担架を固定させて平坦な場所で行ってください。担架が動いて転落する危険性があります。

椅子担架




2.

### 【1名のキャスター移動】

平担架の場合は、背フレーム④の上部左右のパイプを持ち上げて安全な角度で移動してください。

椅子担架の場合は、背フレーム④に付いているグリップ⑤を握って、後方に安全な角度に傾斜させて移動してください。

平担架

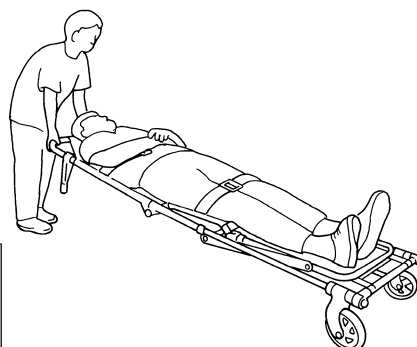

### ⚠️ 注意

安全な角度は患者さんが苦痛でなく又、転落しない角度にしてください。

椅子担架




3.

### 【2名～4名で移動】

平担架の場合は、背フレーム④の上部両端と下部外枠フレームの両端を持ち上げて移動してください。

椅子担架の場合はグリップ⑤と座フレーム⑥を持ち上げて移動してください。


平担架

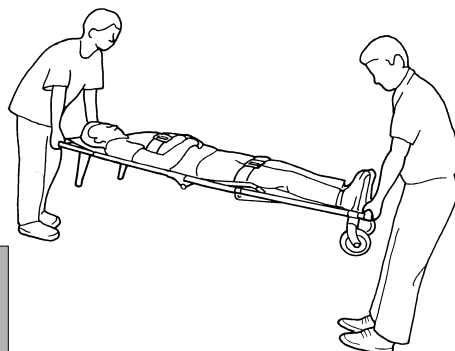

### ⚠️ 注意

水平を保って、患者さんの転落を防止してください。


4. 各折たたみ部分に指、手足、衣服などをはさまないようにしてください。

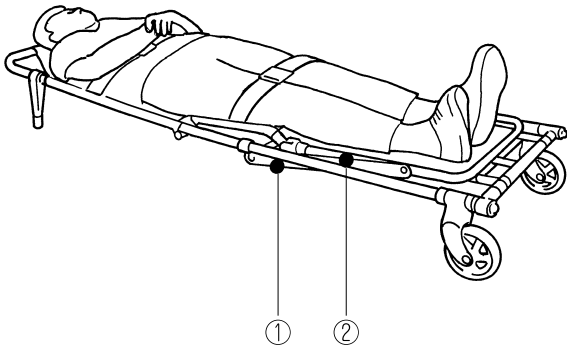

### ⚠️ 注意

①②の左右同じ場所には特に注意してください。ケガをする危険性があります。


5. 平担架・椅子担架でキャスター移動の場合段差、階段などでは必ず持ち上げて移動してください。

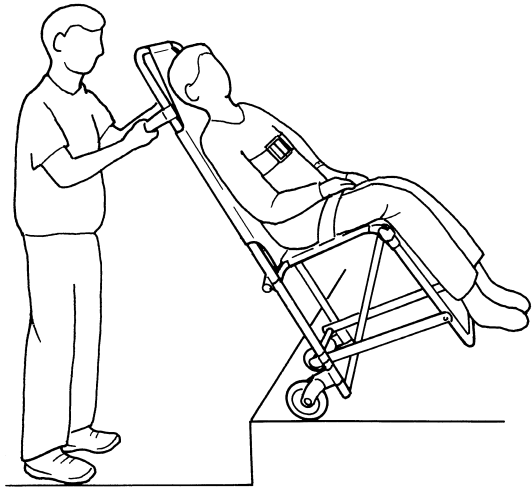

### ⚠️ 注意

患者さんが転落してケガをする危険性があります。またキャスターを破損する恐れがあります。


6. 椅子担架にした場合には必ず、ロックⒺを固定してください。

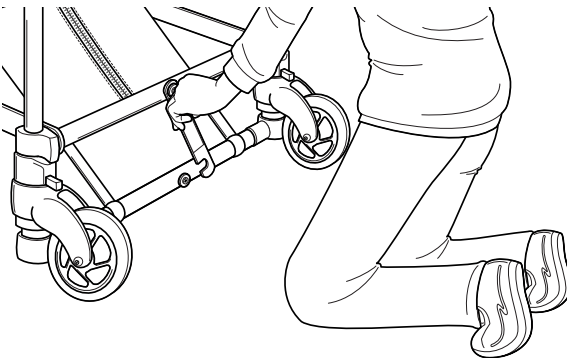

### ⚠️ 注意


ロックⒺが固定していないと背パイプⒶに力が加わった場合、不意に動いて転倒する危険性があります。

7. 使用目的以外に使用しないでください。  
例：荷物などの運搬等

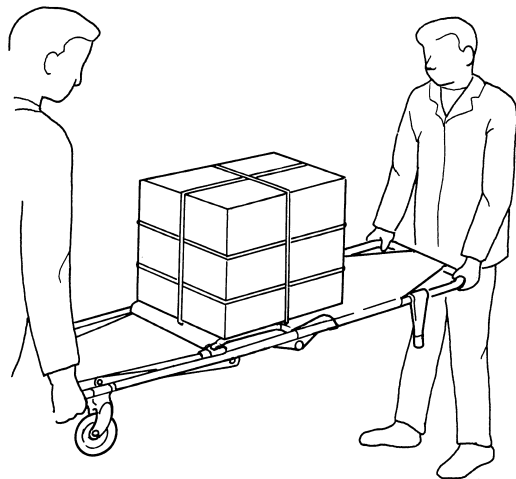

破損の原因になります。

8. ストープなど火気に近づけないでください。シートがこげたり、パイプが加熱されやけどをする危険性があります。

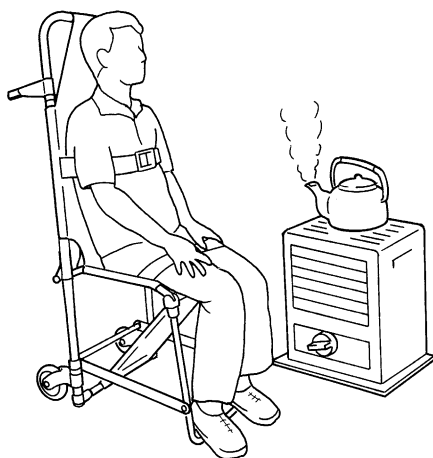

9. 屋内、外の滑り易い場所での移動には転倒にご注意ください。



## 5. 3ヶ月に一度の定期点検

- ①各部連結部のピン、ボルト、ナットのゆるみと脱落
- ②グリップ、キャスターのロックキーの作動
- ③シートのキズ、破れ、ファスナーの破損
- ④車輪の摩擦と破損
- ⑤フレームのゆがみ

注意 車載の場合は振動を考慮して念入りに行ってください。

## 6. 仕様

	全長	全巾	全高	座面高	背丈高	重量	最大荷重
平坦架時	1,925mm	550mm	255mm	—	—	8.5kg	165kg
椅子担架時	650mm	550mm	1,395mm	540mm	1,390mm	8.5kg	

## 7. お手入れのしかた

### ■本体・シート


本体のお手入れは、台所用洗剤に浸した柔らかい布でふきとり、空ぶきをしてください。

- 変質・変色防止のために右図のようなものなどは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



### ■車輪・回転部

布でゴミやよごれをふきとり潤滑油を注油してください。

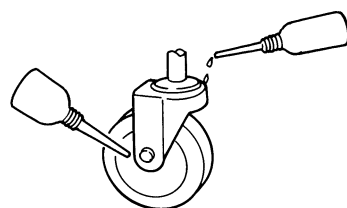

## 8. 保証

- 保証期間は、お買い上げ後1カ年です。（本体、付属品共）  
ただし、次の場合は保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  1. 火災、天災による故障・損傷の場合
  2. 取扱説明書に記載の使用方法、ご注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
  3. 無断仕様変更及び、改造による故障の場合
  4. タイヤの摩耗、シートのやぶれ等の消耗品、及び各部の劣化による故障、損傷の場合

## 9. アフターサービス

万一故障の場合は、お買い上げいただきました販売店または、松永製作所へ保証書ご持参の上、修理をお申しつけください。



## 株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484  
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270  
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>



古紙配合率100%再生紙と、印刷には環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。