
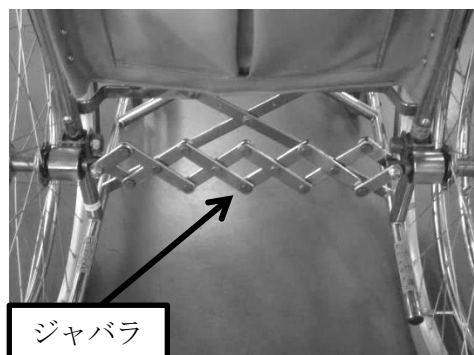


ダブルリング取扱説明書

各部名称

●以下、右操作で説明しています。左操作は左右対称となります。

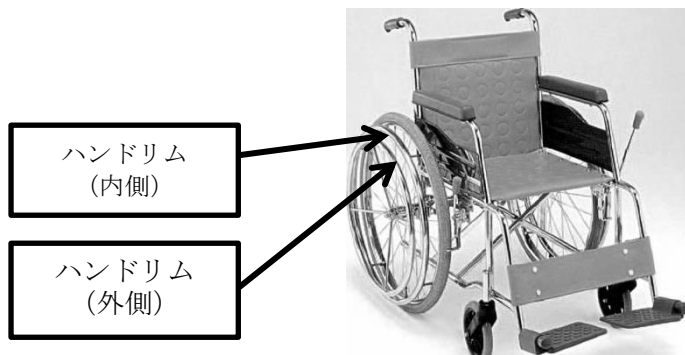


ジャバラの取り付け・取り外し方法

取付け方法

必要工具…13mm スパナ(2本)、(トルクレンチの使用を推奨いたします。)

1. 両輪のブレーキをかけて、車いすが動かないように固定します。

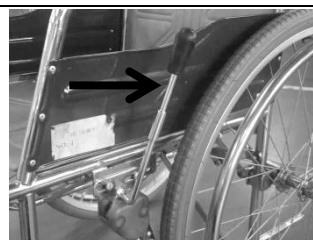


2. ジャバラを固定しているマジックテープを外します。
(倒れると危険ですので、必ずジャバラを片方の手で持ちながらマジックテープを外してください。)

車椅子後部



マジックテープ


3. ジャバラを、もう片方の車輪の車軸につなぎます。

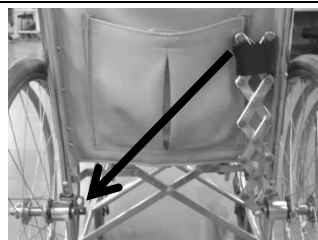

4. 車軸を回転(※)させ、穴を合わせます。ボルト頭を上に向け、ボルトをしっかり締結します。

(目安トルク：6Nm)

※ブレーキの解除が必要となります。ボルト締結時にはブレーキをおかけ直してください。

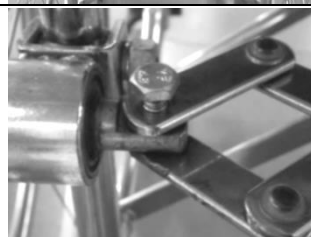




5. 取付けたジャバラにガタツキがないことを確認してください。

※取り外す際は、取付方法と逆の手順でジャバラを取り外してください。



ダブルリングの操作方法

●特殊な操作性ゆえに、慣れるまでは多少の練習が必要となります。

<p>1. 健手側にハンドリムが2本あります。 2本を同時に持ち回転させると、両車輪が駆動し直進します。</p>	 <p>同時回転</p> <p>直進</p>
<p>2. 外側のハンドリムのみを回転させると麻痺側の車輪が駆動し、健手側に進みます。</p>	 <p>外側のみ</p> <p>健手側へ進行</p>
<p>3. 内側のハンドリムのみを回転させると健手側の車輪が駆動し、麻痺側に進みます。</p>	 <p>内側のみ</p> <p>麻痺側へ進行</p>



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、損害を追う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
- ・取付け後は、ジャバラが確実に固定されていることを確認してください。
- ・無理に取付けを行うと、使用中にジャバラが外れたり、各部品が破損する恐れがありますので、その際にはお買い上げいただいた販売店 または (株)松永製作所までお問い合わせください。
- ・この製品は、車椅子の片手操作を目的として設計しております。その他の目的では使用しないでください。
- ・右折、左折、旋回時に操作を誤りやすいので、動作を確認しながらゆっくり操作してください。
- ・急発進、急停止、急旋回は部品の破損につながりますのでおやめください。



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>