


# フット・レッグサポート スイングアウト&エレベータィング

## 取扱説明書


使用者の身体状況に応じて、フット・レッグサポートをエレベータィング（上下方向への角度調整）することが出来ます。さらに、ふくらはぎパットの位置（角度）も調整することが出来ます。

また、フット・レッグサポートをスイングアウト（外開き）したり、取り外したりすることにより、トイレ・ベッド等への乗り移りがしやすくなります。介助の場合には、足元が広くなり移乗動作が楽になります。

### 各部名称

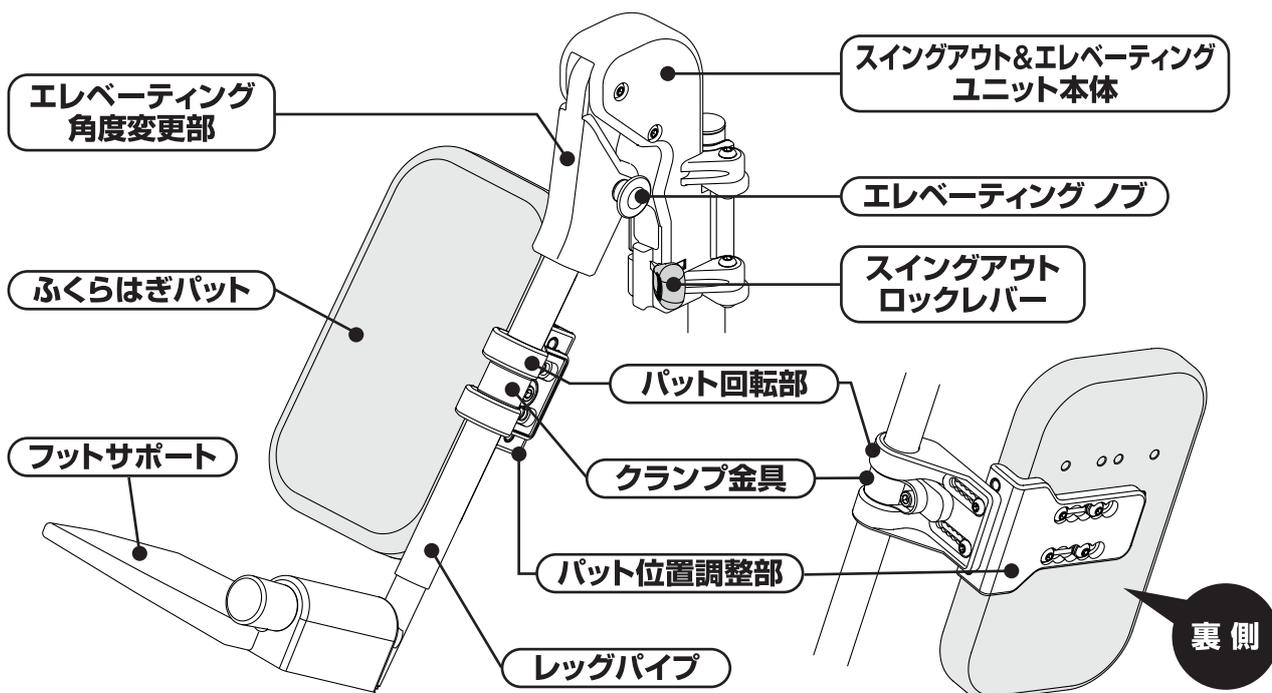


### 使用上の注意

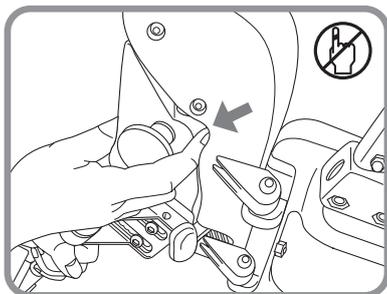

#### ⚠ 注意

- スイングアウト&エレベータィングユニット本体とエレベータィング角度変更部の間で手・指などをはさまないようにしてください。必ずレッグパイプをしっかりと持ち支えながら操作してください。ケガをする原因になります。

していただく

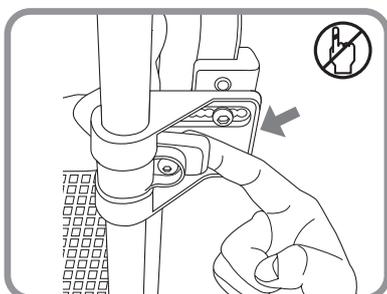


#### ⚠ 注意

- ふくらはぎパットを回転させたときに、クランプ金具とパット回転部の間で手・指などをはさまないようにしてください。ケガをする原因になります。


してはいけない

## エレベータリングの操作方法 (足角度の調整方法)

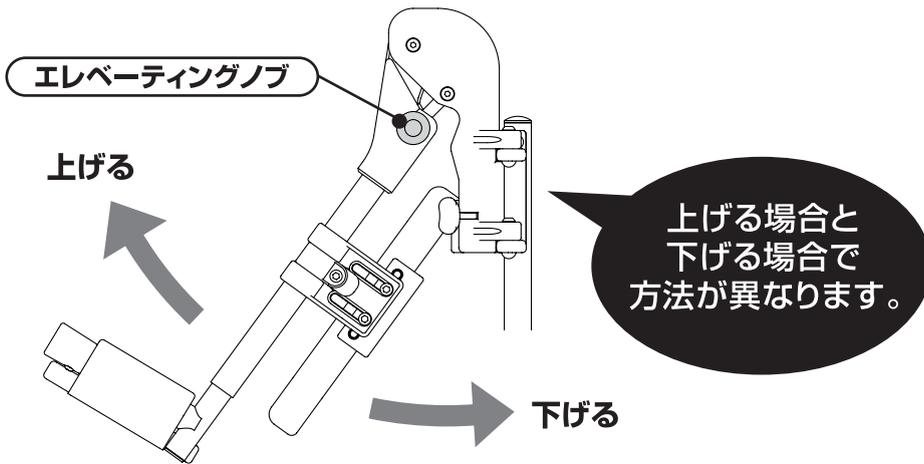


### 上げる場合

操作する側のレッグパイプを持ち、そのまま上げます。適当な位置になったら、少し下げロックされていることを確認してから、手を離してください。

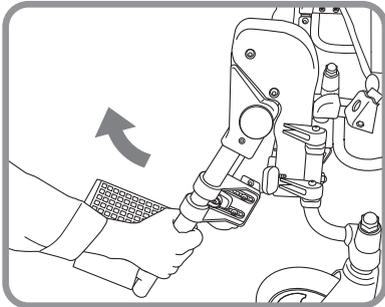

### 下げる場合

操作する側のレッグパイプを片方の手でしっかりと持ちます。もう一方の手でエレベータリングノブを手前へ引きます。(この時、ユニットと使用者の足の重さがかかりますので注意してください。) 適当な位置になったらエレベータリングノブを離し、少しレッグパイプを下げロックされていることを確認してから手を離してください。

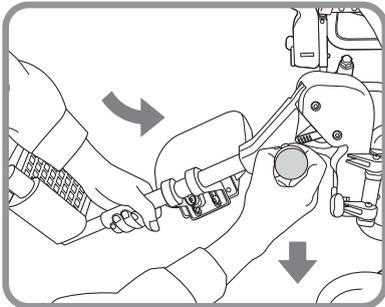


## ⚠ 注意

- スイングアウト&エレベータリングユニット本体とエレベータリング角度変更部の間で手・指などをはさまないようにしてください。必ずレッグパイプをしっかりと持ち、支えながら操作してください。特に、使用者の足を乗せたままの状態で行うときには注意して操作してください。ケガをする原因になります。


していただく


## スイングアウト (外開き) の操作方法

- ① スイングアウトロックレバーを押しロックを解除します。

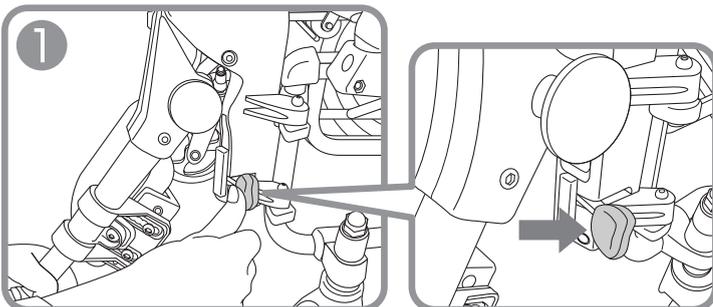

- ② スイングアウトロックレバーを押したままフット・レッグサポートを外側に開くように回転させます。

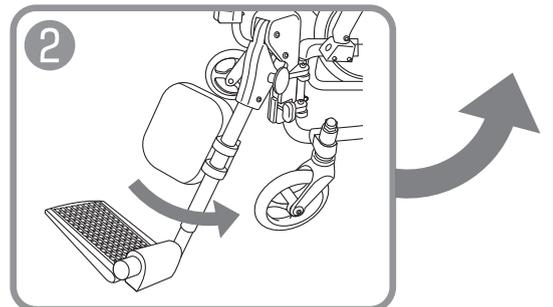

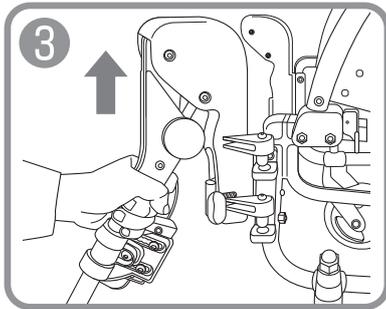

③ フット・レッグサポートを取り外す場合には、外側に開いた状態で真上に持ち上げてください。

スイングアウト&エレベーターユニットは重量がありますので、落としたりしないようにしっかりと持ってください。

●取り付ける場合には、外側に開いた状態で行い、上下のピンを両方とも穴にはめてください。また、必ず奥まで入っているか確認してください。

●スイングアウトを戻すときは、スイングアウトロックレバーを押す必要はありません。そのまま内側に回転させてください。戻した後はロックされていることを確認してください。


## ⚠ 注意

●スイングアウトを戻したときは、ロックが確実にされているか確認してください。足を乗せたときに外れ、ケガをする原因になります。

していただく

## ふくらはぎパットの位置調整


●ふくらはぎパットの位置を上下・前後・左右方向に調整することができます。また、レッグパイプに対する角度も -10度、0度、+10度で変更できます。

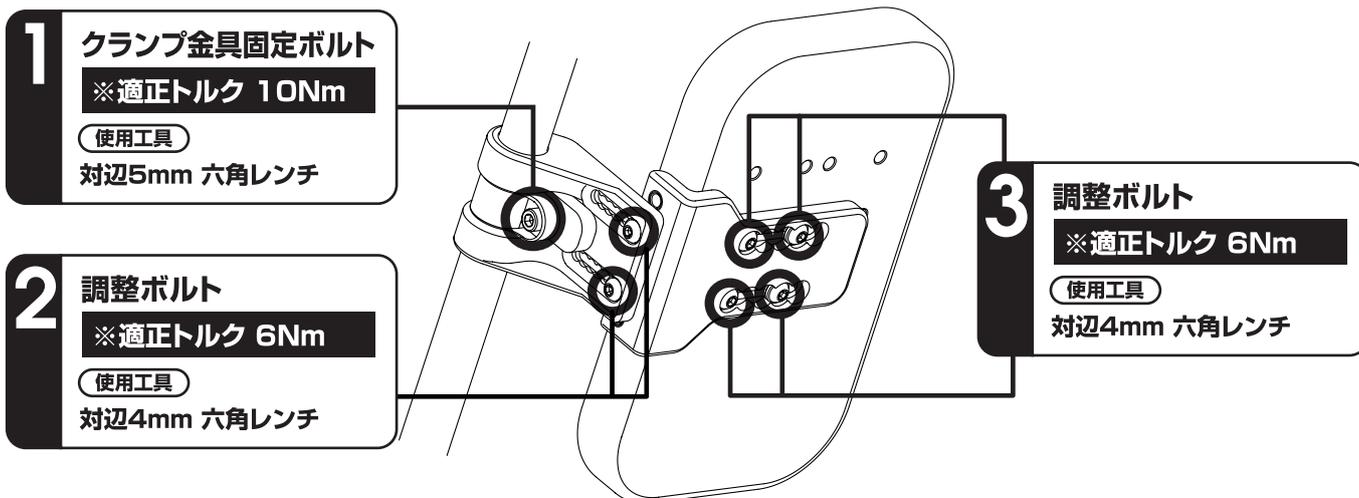

次の調整方法を組み合わせて、最適な位置に設定してください。


### クランプ金具による上下調整

① 1のクランプ金具固定ボルトを緩め位置を調整します。

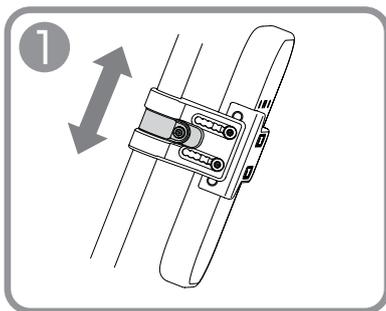

② 位置が決まったら、ボルトを軽く締めてください。

③ ふくらはぎパットを使用状態の位置に戻し、回転が止まる位置を確認してください。回転が止まる位置は下図のように左右のふくらはぎパットが揃うように調整してください。

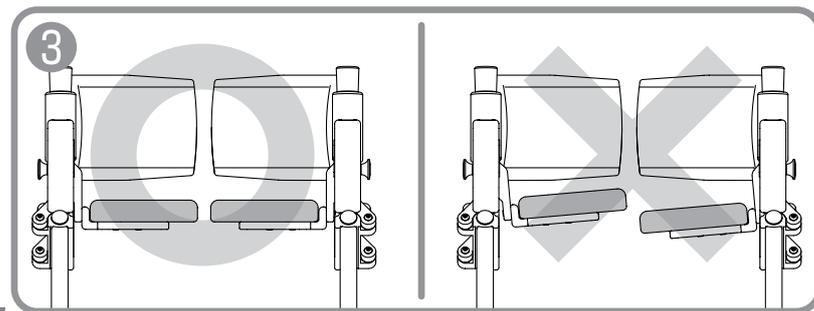

④ ボルトを締めてください。(適正トルク 10Nm)

## ⚠ 注意


●ボルトは必ずしっかりと締めてください。ふくらはぎパットがずれ、足が落ちてケガをする原因になります。

していただく

## パット位置調整部による調整


### 上下調整方法【1】

②の調整ボルトを取り外して調整します。下図のように3段階に調整ができます。

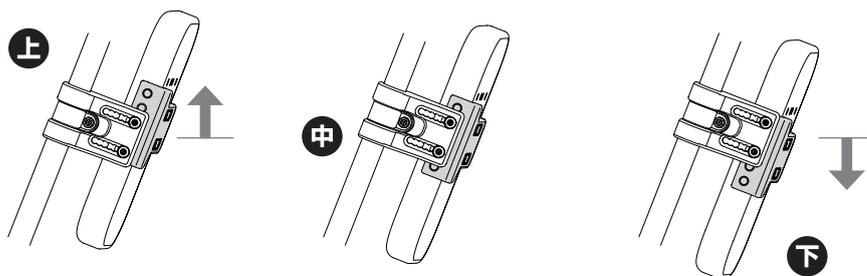


### 上下調整方法【2】

③の調整ボルトを取り外して調整します。下図のように2段階に調整ができます。さらに、ふくらはぎパットの上下を入れ替えると、調整範囲が広がります。

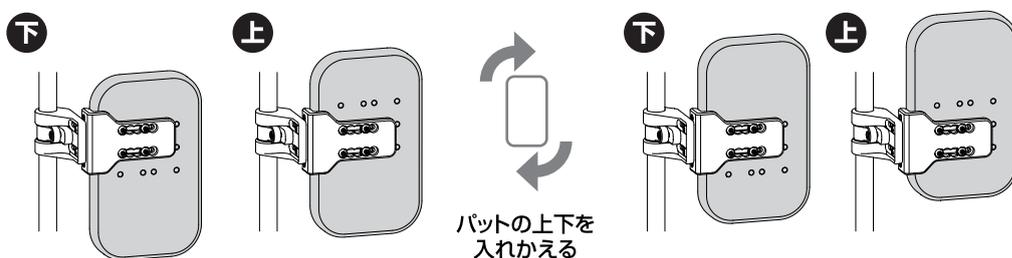


### 左右調整方法

③の調整ボルトを取り外して調整します。下図のように2段階に調整ができます。

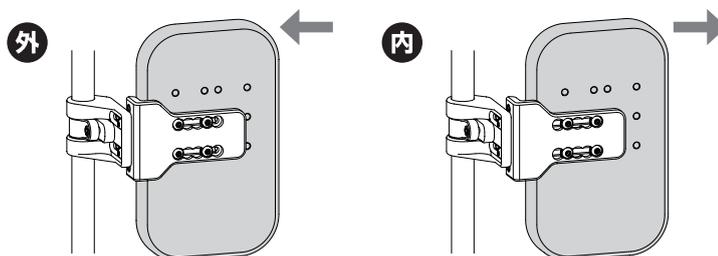

### 角度調整方法

②の調整ボルトを取り外して調整します。下図のようにボルトの取り付け位置を上下ひとつずらすと角度をつけることができます。

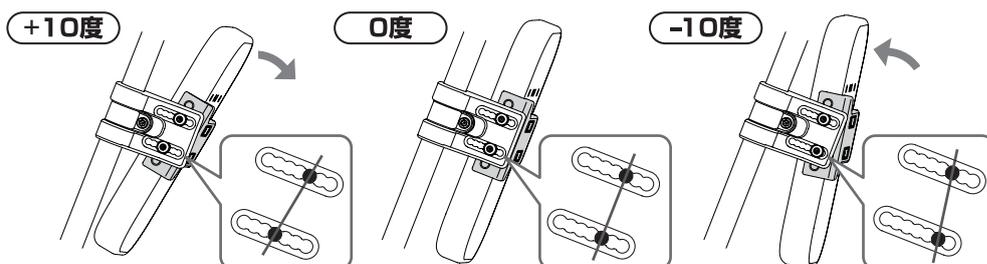

### 前後調整方法

②の調整ボルトを取り外して調整します。7段階に調整することができます。



## ⚠ 注意

●②、③のボルトは必ずしっかりと締めてください。(適正トルク 6Nm)  
ふくらはぎパットが外れ、ケガをする原因になります。

していただく



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484  
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270  
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>