

# オアシス シリーズ専用・オプション



## 前折れ角度の調整方法

OS-12TR、11TRS、12TRSの場合

●使用者の身体状況に合わせて、前折れ角度(4段階)を調整することができます。  
(最後(前折れ90°)の穴は折りたたみの際に使用する)



①バックサポートの角度を調整します。  
(オアシス SERIES 取扱説明書 P.13  
バックサポートリクライニング参照)

②片手でグリップを持ち、もう片方の手で  
バックサポート後部の前折れジョイント・ワイヤーを引き、  
前折れジョイントのロックを解除します。

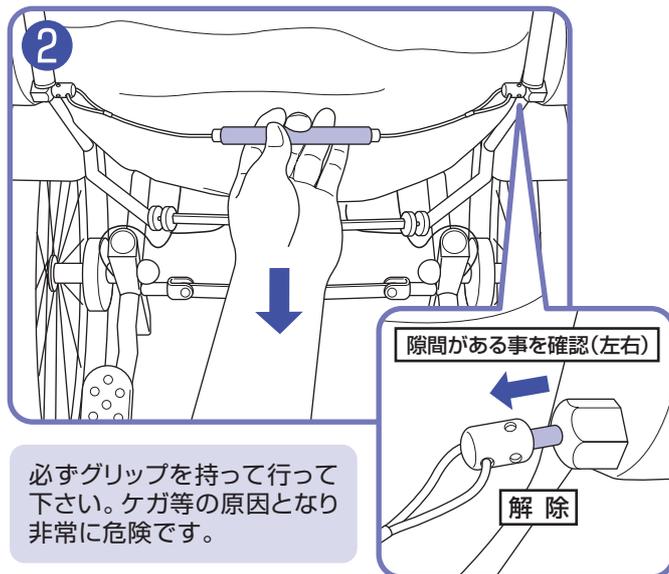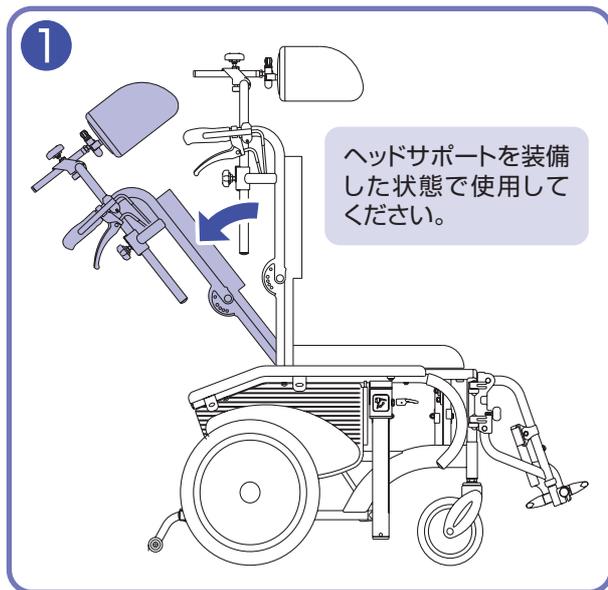

③バックサポート上部の角度を調整します。

④身体状況にあった角度で前折れジョイント・ワイヤー  
を離し、前折れジョイントピンが確実にロックされて  
いるか確認してください。

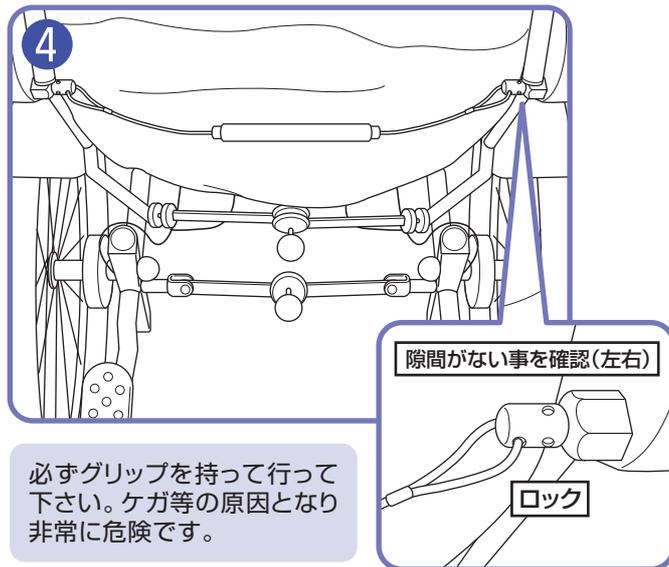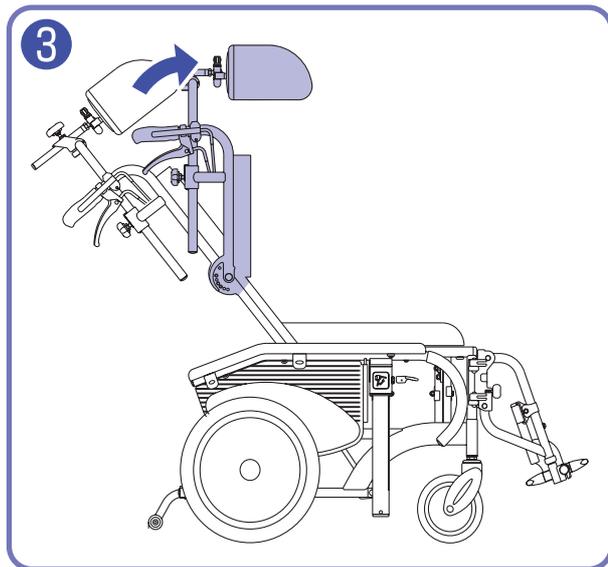

**警告**

●バックサポートの角度調整および前折れ角度の調整を行う時は、駐車用ブレーキを必ずロックしてください。  
(車いすが動いて、転倒・転落事故等の原因となります。)

していただく



**警告**

●前折れジョイントピンが「カチッ」と音がして、確実にロックされていることを確認してください。  
(転倒・転落事故等の原因となります。)

していただく