

# 座位保持機能付 スリム&超低床車いす

## 超スリム&超低床セミモジュール車いす “ネクストコア・ミニモ”

JIS100kg認証



取得済 100kg  
※前座高390mmの場合のみ

NEXT-50B(自走)

標準価格：161,000円 TAIS：00066-000328

NEXT-60B(介助)

標準価格：161,000円 TAIS：00066-000329

### ●超低床

前座高：350mm～  
390mm

### ●超スリム

全幅：56cm(自走)  
55cm(介助)

#### ●肘掛け跳ね上げ

移乗のしやすさを向上させることで介助者の負担を最小限にします。

#### ●フットサポート調整

フットサポート高さを工具を使わずに調整できる新機構を採用しました。



### NEXT-50B(自走)



#### ●背張り調整ベルト標準装備

●フットサポート スイングアウト・スイングイン & 真上への着脱  
様々な移乗のシチュエーションに対応が可能です。




「座位の安定」⇒「食事などに集中できる環境の確保」  
「座る」ことへのこだわりポイント


### ポイント① 円背への対応



肩部分が背パイプに当たらないよう、背パイプを後方へ大きく曲げました。

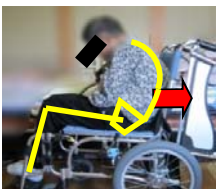


従来の背もたれの車いす

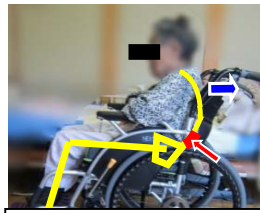

ネクストコア

円背の人もしっかりと正面を見て座れる  
驚きの「逃がし幅」!

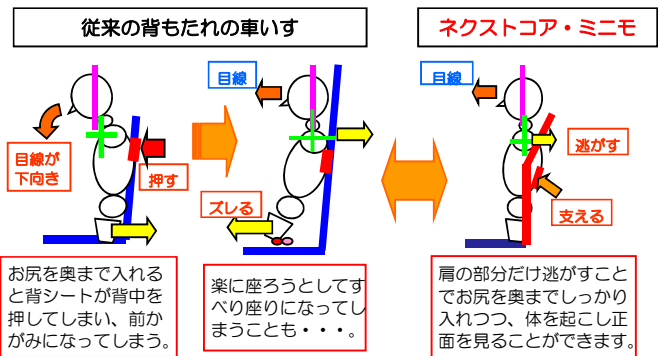

できるだけ骨盤を起こしつつ体を起こすことで、腹部や胸部への圧迫を減らし、少しでも食事や呼吸がしやすい環境を整えることを目指します。

<お問合せ>

<製造元>




株式会社 松永製作所  
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484  
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270  
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

# ネクストコア・ミニモのモジュール機能

「座位の安定」⇒「食事などに集中できる環境の確保」  
「座る」ことへのこだわりポイント

## ポイント② 側彎への対応(左右独立の背張り調整機能/3D立体スリングシート)

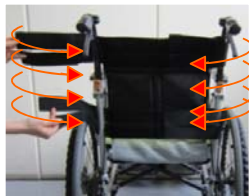

片側のベルトだけゆるめることで・・・




側彎(そくわん)の女性



凸部分だけ逃がします。


背シートの左右に張り調整ベルトを取り付けました。片側を緩め反対側を張ることで、側彎の凸部分だけを逃がすことができ、より高い圧分散と座位の安定が期待できます。

### ●今までの背張り調整シート

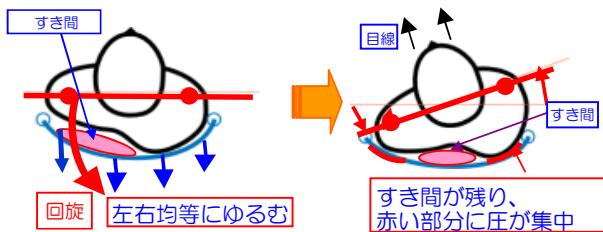

左右の背パイプに対して肩のラインが斜めになり、凸部への圧が残る上、横倒れの原因にもなってしまいます。

### ●ネクストコア・ミニモ

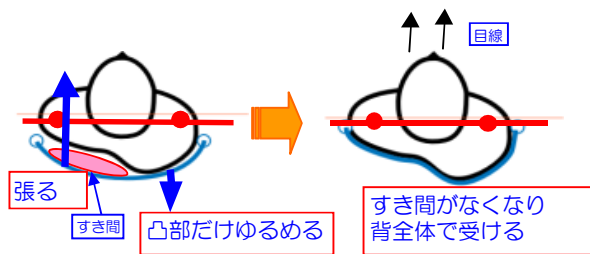

左右の背パイプに対して肩のラインが平行になり、背中全面に圧が分散されると共に、正面も見やすくなります。

## ポイント③ 座面高さ調整機能




ご利用者の身長や使い方に合わせ、座面高さを調整することができます。

## ポイント④ 肘掛け高さ調整機能



ご利用者の身長や使い方に合わせ、肘掛け高さを調整することができます。

## ポイント⑤ フットサポート前後角度調整機能

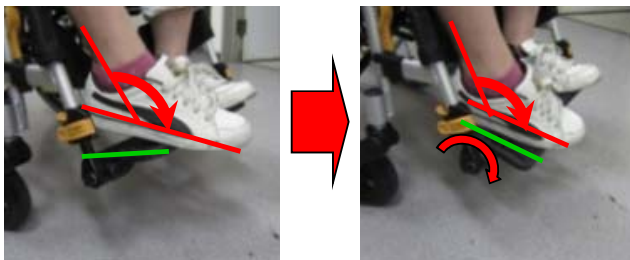

ご利用者の足の位置、関節の角度に合わせてフットサポートの前後位置・角度を調整することができます。

	キヤスタ [インチ]	大車輪 [インチ]	前座高 [mm]	後座高 [mm]	シート幅 [mm]	シート奥行 [mm]	アームサポーター高 [mm]	バックサポーター高 [mm]	フット長 [mm]	全長 [mm]	全高 [mm]	全幅 [mm]	折返し幅 [mm]	重量 [kg]
NEXT-50B	6 (前座高は390mm時)	20	350/370/390	325/345/365	400	360	225~285	460	285~375	940	880	560	280	14.3
NEXT-60B	6 (前座高は390mm時)	16	350/370/390	325/345/365	400	360	225~285	460	285~375	940	880	550	270	13.6

改良のため予告なしに仕様を変更する事があります。

※出荷時は前座高390mm、後座高365mm ※各寸法は前座高390mm時