

# ネクストコア (NEXT CORE)



時代の一步先を行く、次世代スタンダード車いす！それがNEXT CORE(ネクストコア)。

## ●超軽量&コンパクト設計

女性や高齢の介助者にうれしい、持ち運びがしやすい軽量設計。折りたたんで軽自動車のトランクにも入ります。



## ●フットサポート高さ調整

フットサポート高さを工具を使わずに調整できる新機構を採用しました。



NEXT-21B(介助)



## ●左右独立タイプ背張り調整

左右別々に張り調整をする「立体スリングシート」で「正面」「側面」「上面」の3方向から姿勢を整えます。



NEXT-11B(自走)

## シート色



F-1



F-2




F-3



F-4


## 1. 次世代車いす「スリム」・「軽い」・「手入れしやすい」

### 全幅が10cmスリムに！！

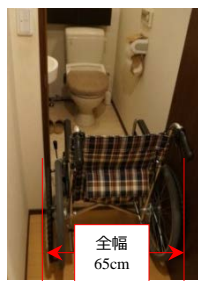

全幅  
65cm

一般的な車いす

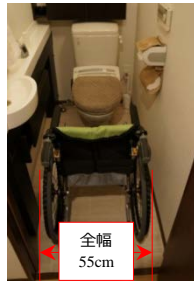

全幅  
55cm

ネクストコア

全幅：**55cm**(自走) 重量：**11.8kg**(自走)  
**54cm**(介助) **10.8kg**(介助)

### ◆ネクストコアは超スリム&コンパクト。

在宅用に徹底的にこだわって設計された、次世代車いすと呼ぶにふさわしい一步先行くスタンダード車いすです。

#### ポイント①： 超スリム&コンパクト

全幅は自走タイプで55cm。従来の車いすと比較すると、10cmもスリムに！全長も従来の車いすと比較するとコンパクトになりました。

#### ポイント②： 軽量

とにかく軽い！背張り調整が付いているのに自走タイプで11.8kg。とことん使いやすさにこだわった、これからの時代の車いすです。

#### ポイント③： お手入れしやすい

ネクストコアは、お手入れのしやすさにも工夫しました。ゴミやほこりが集まりやすいすき間をできるだけ少なく、そして見た目もスタイリッシュに。パーツの一つひとつからデザインを刷新しました。



全長  
101cm



全長  
94cm

在宅用に設計されたスリム&コンパクトサイズ。居宅内の移動もスムーズにできます。

### <製造元>



株式会社 松永製作所


〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484  
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270  
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

2. 座位のバランス・安定性にも配慮した設計です！

ポイント①：背フレーム後方曲げ構造




肩部分が背パイプに当たらないよう、背パイプを後方へ大きく曲げました。

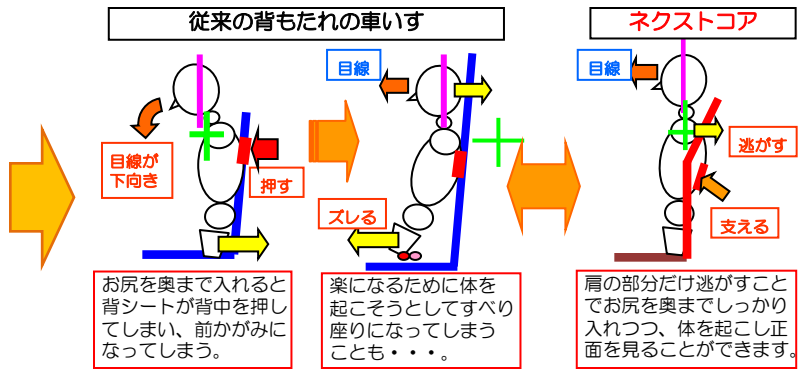

ポイント②：左右独立式「立体スリングシート」

※「立体スリングシートは(有)であい工場の登録商標です。」

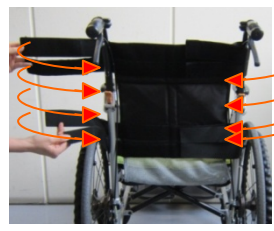

背シートの左右に張り調整ベルトを付け、背フレームを巻き込むように固定する構造にしました。片側のベルトだけゆるめることで・・・



**●今までの背張り調整シート**

すき間 回旋 左右均等にゆるむ

すき間が残り、赤い部分に圧が集中

左右の背パイプに対して肩のラインが斜めになり、凸部への圧が残る上、横倒れの原因にもなってしまいます。

**●立体スリングシート**

張る すき間 凸部だけゆるめる

すき間がなくなり、背全体で受ける。


左右の背パイプに対して肩のラインが平行になり、背中全体に圧が分散されると共に、正面も見やすくなります。

ポイント③：骨盤サポート



イメージ

骨盤を左右から両手で支えるように安定させる構造にしました。

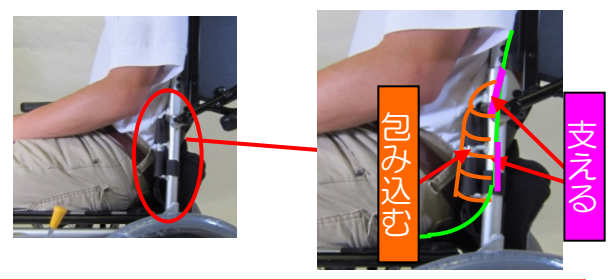

横に倒れてしまいがちな人の骨盤もしっかり支えます。