

# <ふくらはぎカバー・取扱説明書>


このたびは、ふくらはぎカバーをお買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく、安全にご使用していただく為に、この説明書をよくお読みください。


また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。

## 構成部品

- ① ふくらはぎカバー：2個（左右共通）
- ② 取扱説明書：1冊（この紙）

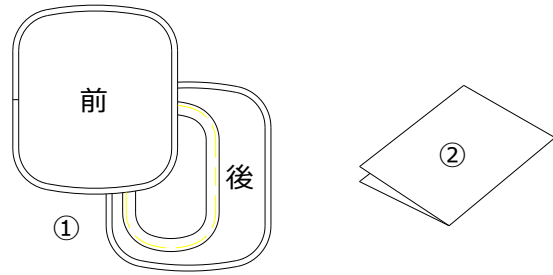

## カバーの取付け方法

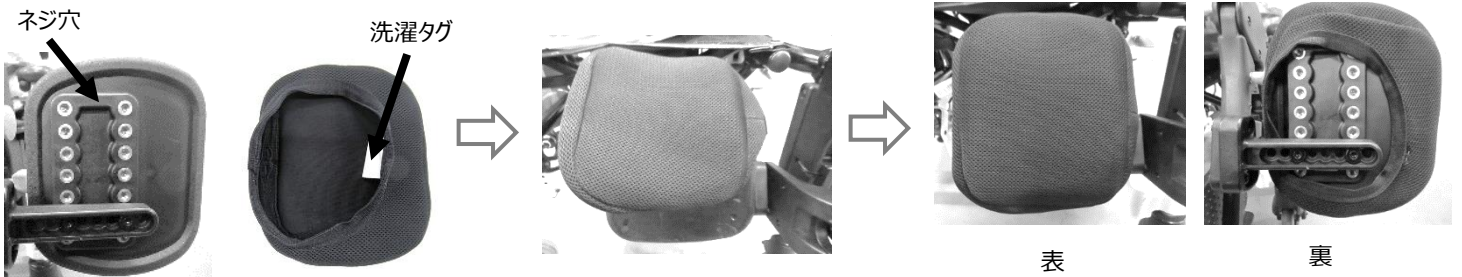

①パッドのネジ穴では無い側に  
洗濯タグが来るようにする

②パッドの正面から、  
パッド上側にカバーをかぶせる

③下に引っ張りながら、  
パッド下側にかぶせ、  
位置を調整する

※写真は、左側ふくらはぎパッドを  
裏から見た図です

④もう一方も同様に取付ける

## お手入れ方法

- 洗濯機を使用する場合は、ネットに入れ、手洗いモードで洗濯してください。  
白色及び淡色物と一緒に洗わないでください。
- 掃除する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、汚れ・ホコリを拭き取った後に、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484  
TEL0584-35-1180(代) FAX0584-35-1270  
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

202007\_ES