

歩行補助器 取扱説明書

この度は松永製作所の歩行補助器をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
また、保証書が付いていますので、大切に保管して下さい。

品番

MV-10型

お守りいただく内容の絵表示の説明



注意



強制



禁止

●レバー

■使い方

レバーを握り、パーキングレバーを手前に押して下さい。
ブレーキロック状態になります。
この時、ロックがしっかりかかっているか確認して下さい。

■解除方法

レバーだけを再び握って下さい。

●パーキングレバー

●高さ調節ツマミ

高さ調整ツマミは、左右とも、ご自分に合った押し手高さで、穴位置を合わせ、しっかりしめて下さい。

人をのせたまま移動しないで下さい。

転倒してケガをする恐れがあります。


●バッグ

☆折畳み方法
座面を矢印方向にたたんで下さい。

☆使用方法
座面を止まる所までしっかりおろして下さい。

仕 様		
	使用時	折畳み時
全長	615mm	240mm
全高	780~925mm	860mm (min)
全幅	390mm	390mm
前座高	440mm	
後座高	405mm	
重量	3.5kg	
耐荷重	80kg	
材質	アルミ製	

※仕様、及び外観は改善のため変更することがありますのでご了承下さい。

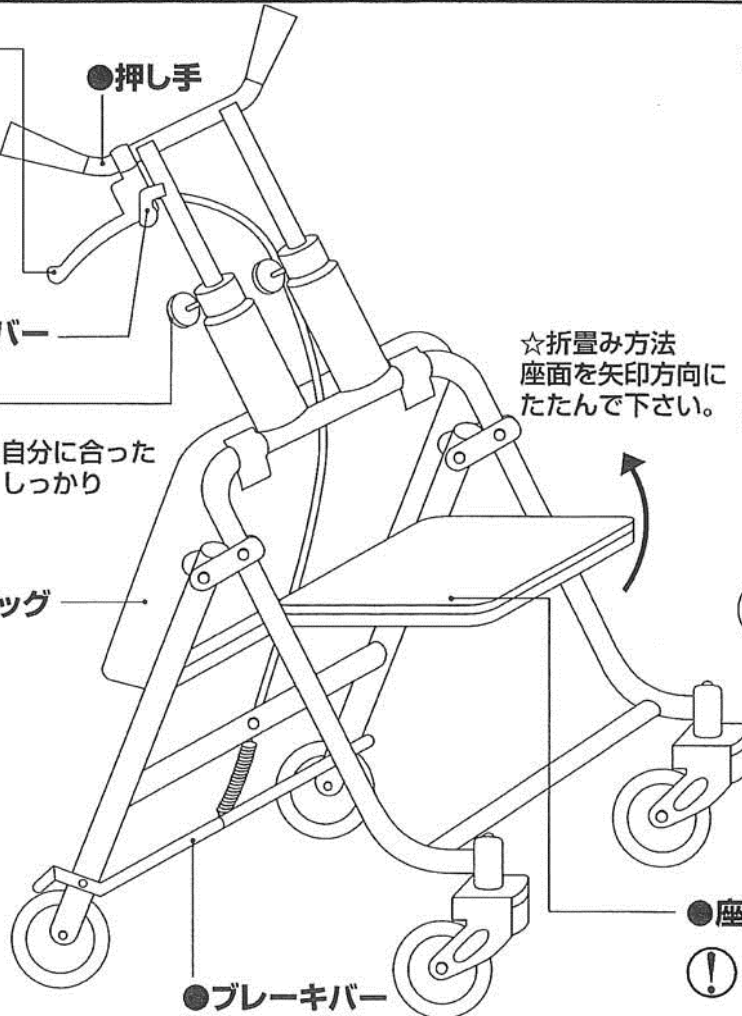

●ブレーキバー



ブレーキをロックしないで座ると、転倒の恐れがあります。



腰掛ける時は
ブレーキをロックして
深く座って下さい。