


歩行器 取扱説明書

保存用 【保証書付】
※必ず保管しておいてください。

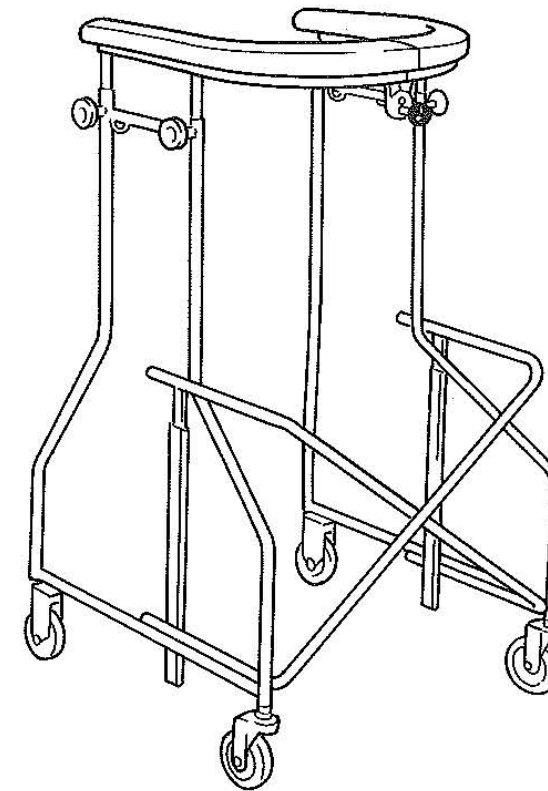

このたびは、松永製作所の歩行器をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取扱説明書には、お客様が安全に正しくご使用していただくために必要な注意事項や正しい使い方が説明されています。ご使用になる前には、必ずお読みください。また、保証書が付いておりますので紛失しないように大切に保管してください。


目次

1. 各部の名称	1
2. 梱包状態	1
3. 拡げ方と折りたたみ方及びご注意	2
4. ご使用方法とご注意	3~4
5. お手入れのしかた	5
6. 仕様/別売品	5
7. 保証	6
8. アフターサービス	6




株式会社 松永製作所
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

1. 各部の名称

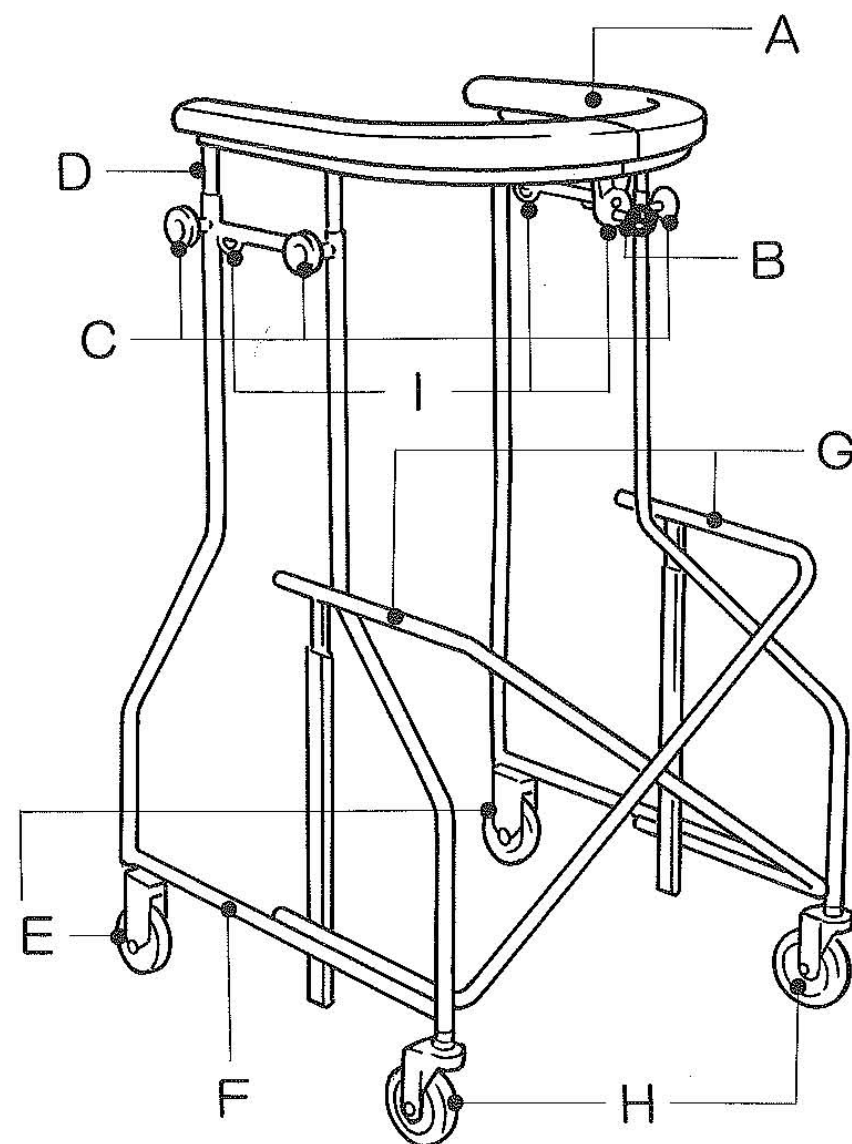


- A. 馬蹄
- B. ロックピン
- C. 上下調節ノブボルト
- D. インナーパイプ
- E. 後車輪
- F. フレーム本体
- G. スライドバー
- H. 前輪キャスター
- I. サドルリング

2. 梱包状態

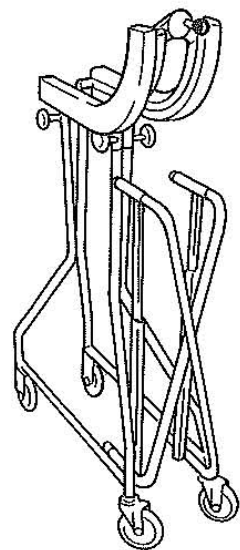

- ご使用まえに
このたびは当社の歩行器をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用まえに製品のご確認をお願いします。
- ①ダンボール箱がつぶれたり、汚れたりしていないかご確認ください。
- ②フレームのゆがみ、キズ、馬蹄の破損及びボルト、ナットのゆるみがないかご確認ください。
- ③A～Iまでの部品が異常なく取付いているかご確認ください。
もし異常があれば販売店又は松永製作所にご連絡ください。

3. 広げ方と折りたたみ方及びご注意

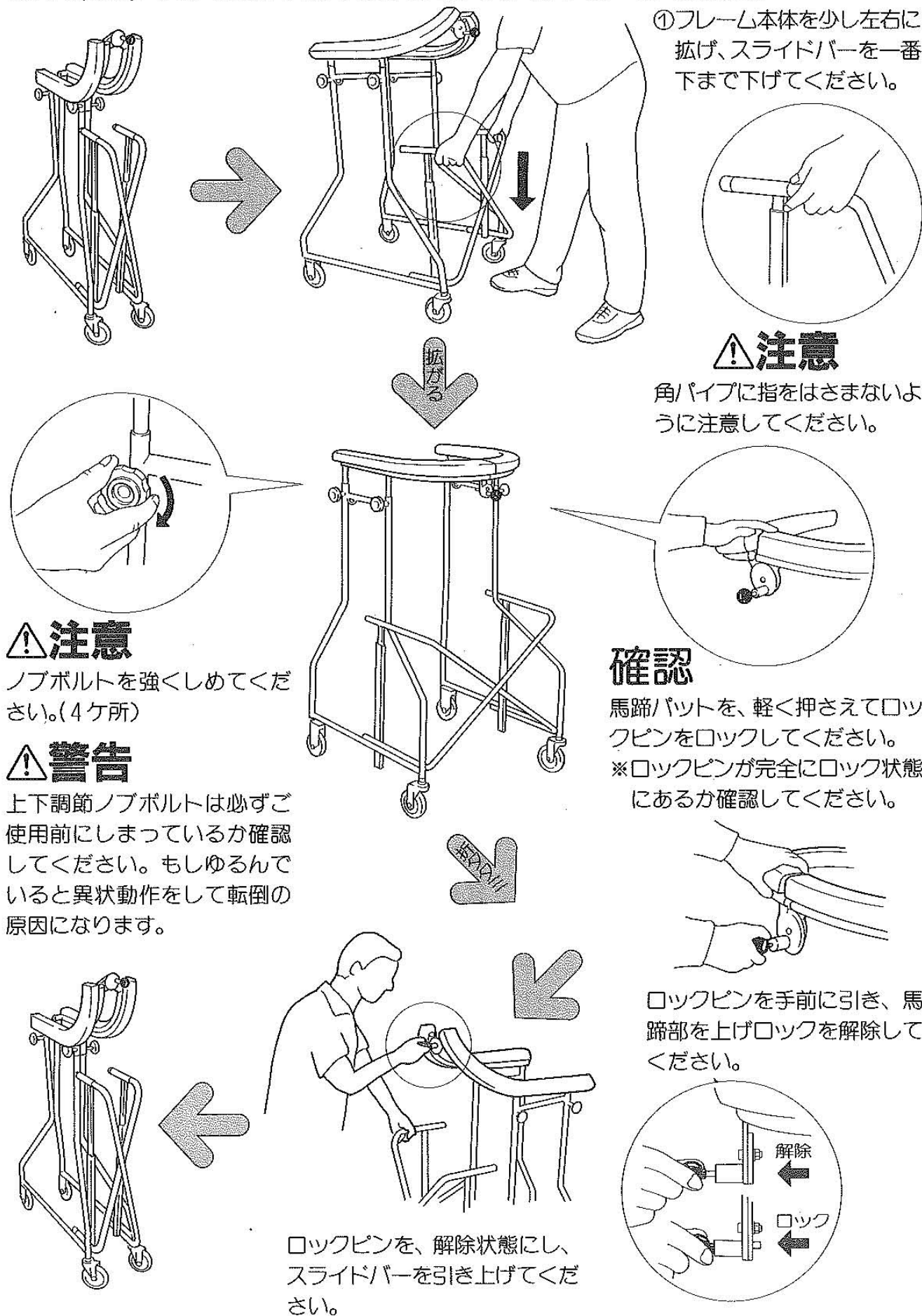

4. ご使用方法とご注意


■歩行器は、歩行能力の低下した人や麻痺の有る人が、装具などを付けて歩行訓練や補助車として使用するものです。症状や身体状況により馬蹄の高さを調整して、能力にあった速度で十分に注意して使用してください。なお屋外での使用には適しません。室内の平坦な場所でご使用ください。

1. 【馬蹄の高さの合わせ方】


フレームパイプ本体上部4ヶ所についているノブボルトを少し緩めて馬蹄を持ち上げ、適当な高さの所でインナーパイプをノブボルトで仮締めしてください。

2.

後車輪うしろに自然な姿勢で立ち、安定した状態で馬蹄の上に手を置き、馬蹄を握る姿勢が標準です。病状や症状の軽い、重い、また脚力や腕力、握力の強い、弱いを十分に考慮して馬蹄の高さを決めてください。病院等で医師、理学療法師、専門家のアドバイスを受けてください。

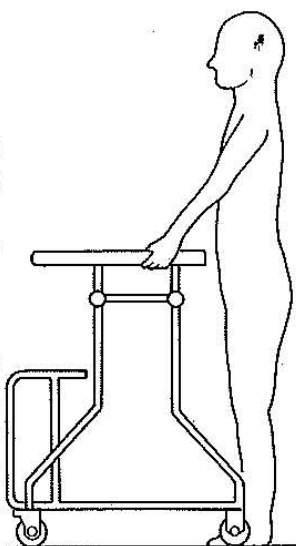


3. 位置が決まったらノブボルトを強く締めて固定してください。

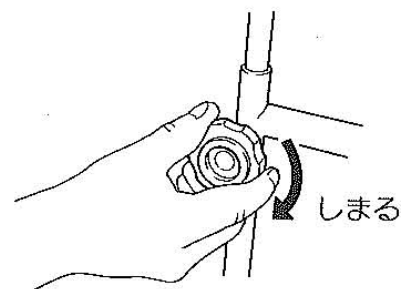


⚠注意 しっかりと締まっていないと異常に動いて転倒の原因になります。

4. 歩行補助の目的以外には使用しないでください。 ◆荷物の運搬や乗用として使用すると破損の原因になります。

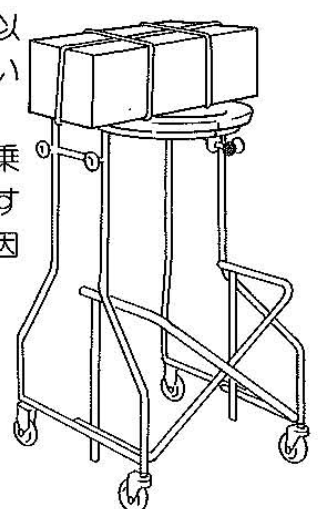


5. 段差のある所や階段、坂道、一般道では使用しないでください。 ◆転倒の原因になります。

⚠警告

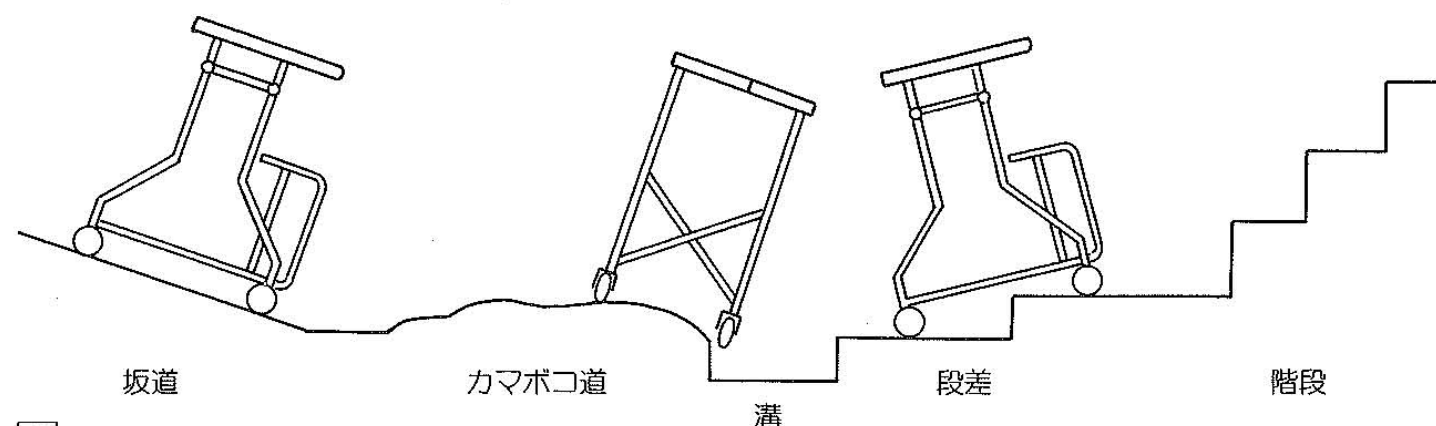


6. 馬蹄の中央より前方に体重がかかる場合は、前に転倒する恐れがあるので、腰を低くして転倒に注意してください。

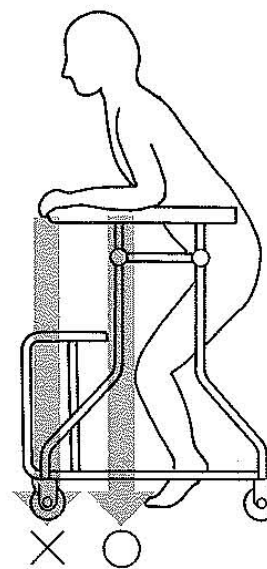

⚠注意

極度に前方に重心がある場合は転倒の原因となります。


7. 直射日光やストーブ等による加熱に注意してください。

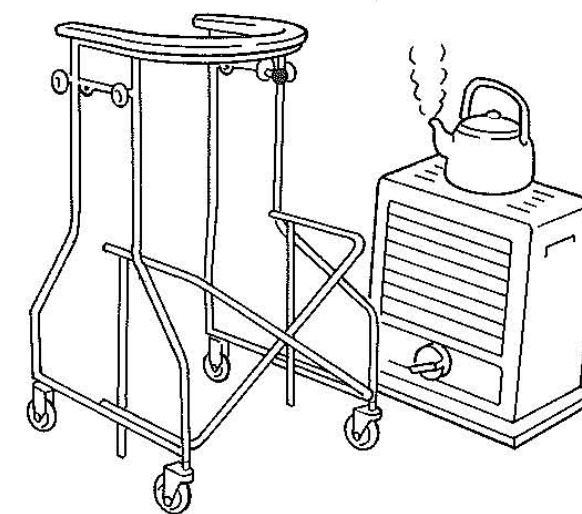

⚠注意

馬蹄が燃えたり、パイプの加熱によってやけどをする原因になります。

8. 浴室やシャワー等、水にぬれる場所や滑りやすい場所では使用しないでください。

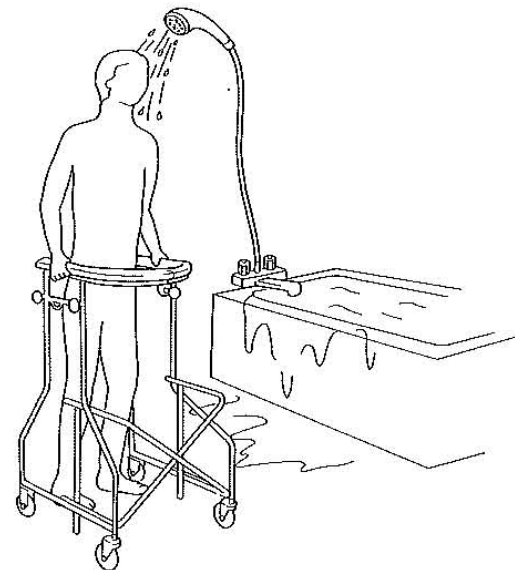

3ヵ月に一度の定期点検をして下さい。

1. 馬蹄の高さ調節ノブボルトの締め具合を調べる
2. 車輪と車軸の摩耗と取付けナットの緩みを調べる
3. 折りたたみ式の場合は各部回転部の摩耗とナットのゆるみを調べる
4. 馬蹄と本体の表面の破損をしらべる
5. 溶接部分の接合を調べる
6. 回転部分に注油をする

異常がある場合は販売店にご連絡ください。



◆馬蹄の破損や、フレーム及び回転部分、車輪のサビなど故障の原因となります。

5. お手入れのしかた

■本体・馬蹄


本体のお手入れは、台所用洗剤に浸した柔らかい布でふきとり、空ぶきをしてください。

- 変質・変色防止のために下図のようなものなどは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際はその注意書に従ってください。




■車輪

車輪のお手入れは、布でよごれやゴミを取って潤滑油を回転部分に注油してください。

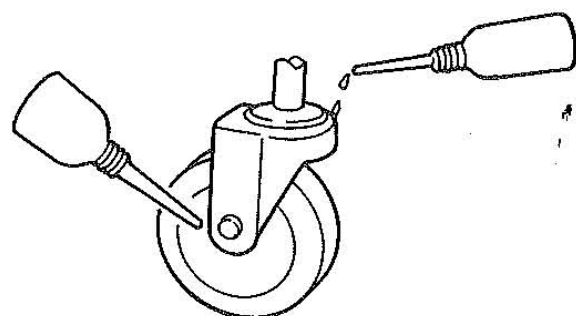

6. 仕様／別売品 (お買い上げの販売店でお求めください)

型式	寸法	全 長	全 巾	全 高	馬蹄内奥行	馬蹄内々巾
SM10 大		770mm	670mm	1000~1250mm	460mm	360mm
SM10 中		650mm	620mm	860~1090mm	440mm	320mm
本体 (クロームメッキ仕上) 馬蹄色 (茶) 前輪車径 (自在4インチ) 後輪車径 (4インチ)						

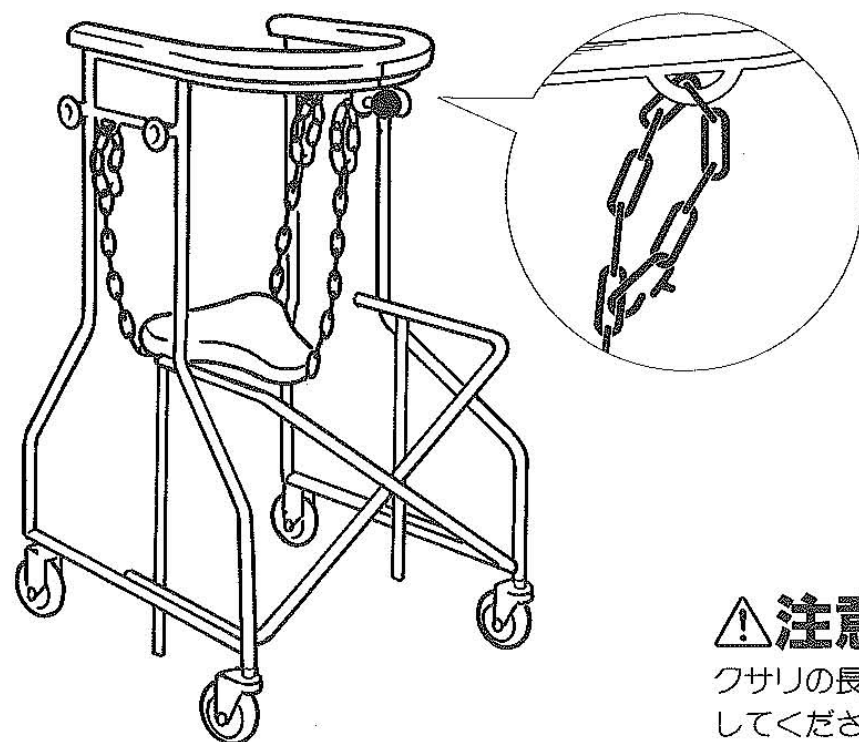

別売品サドル

取付けはサドルリングにクサリを通し、サドルに座って足が地面に接地する高さに合わせて、クサリの先端に付いている金具をクサリにひっかけてください。

⚠ 注意

クサリの長さを均一にして金具の固定を確認してください。

基準寸法以外のものや、ガードル架、ボンベ架など又変形馬蹄、ブレーキ付、抵抗器付、ウエイト付、足交差防止バー付等はオーダーメイドでお作りします。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書 (別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保管してください。



7. 保証

- 保証期間は、お買い上げ後1カ年です。(本体、付属品共) ただし、次の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 1. 火災、天災による故障・損傷の場合
 2. 取扱説明書に記載の使用方法、ご注意に反するお取り扱いによって発生した故障の場合
 3. 無断仕様変更及び、改造による故障の場合
 4. タイヤの摩耗、馬蹄、シートはやぶれ、塗装のキズ、サビ等の消耗品、及び各部の劣化による故障、損傷の場合
 5. 修理に要した運賃等の諸経費

8. アフターサービス

万一故障の場合は、お買い上げいただきました販売店または、松永製作所へ保証書ご持参の上、修理をお申し付けください。



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>