

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書（別添付）

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入を
お確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保管してください。



6. 保証


- 保証期間は、お買い上げ後1カ年です。(本体、付属品共)
ただし、次の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- 1. 火災、天災による故障・損傷の場合
- 2. 取扱説明書に記載の使用方法、ご注意に反するお取り扱いによって発生した故障の場合
- 3. 無断仕様変更及び、改造による故障の場合
- 4. タイヤの摩耗、馬蹄、シートのやぶれ、塗装のキズ、サビ等の消耗品、及び各部の劣化による故障、損傷の場合
- 5. 修理に要した運賃等の諸経費

7. アフターサービス

万一故障の場合は、お買い上げいただきました販売店または、松永製作所へ保証書ご持参の上、修理をお申し付けください。

歩行器 取扱説明書

保存用 【保証書付】
※必ず保管しておいてください。

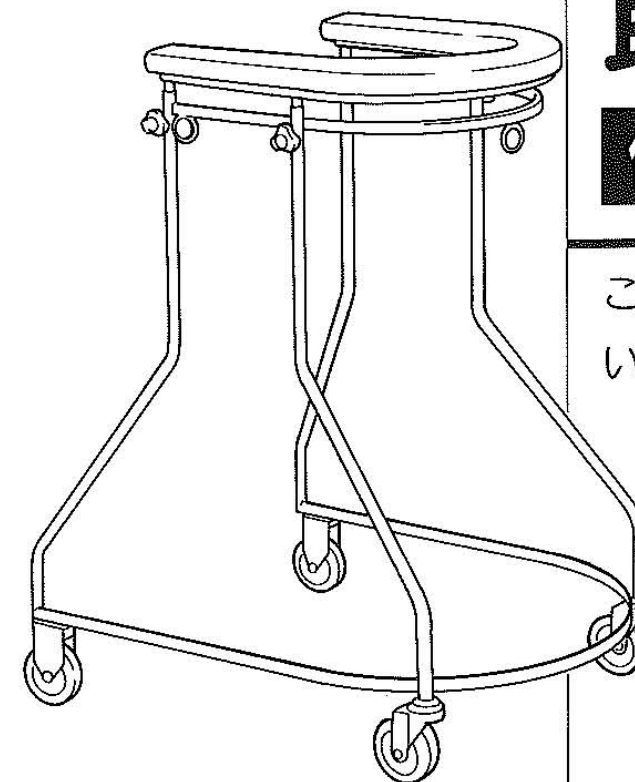


このたびは、松永製作所の歩行器をお買い上げ
いただき、ありがとうございます。この取扱説
明書には、お客様が安全に正しくご使用して
いただくために必要な注意事項や正しい使
い方が説明されています。ご使用になる前
には、必ずお読みください。また、保証書
が付いておりますので紛失しないように大切
に保管してください


目次

1. 各部の名称	1
2. 梱包状態	1
3. ご使用方法とご注意	2~3
4. お手入れのしかた	4
5. 仕様、別売品	4
6. 保証	5
7. アフターサービス	5

1.各部の名称

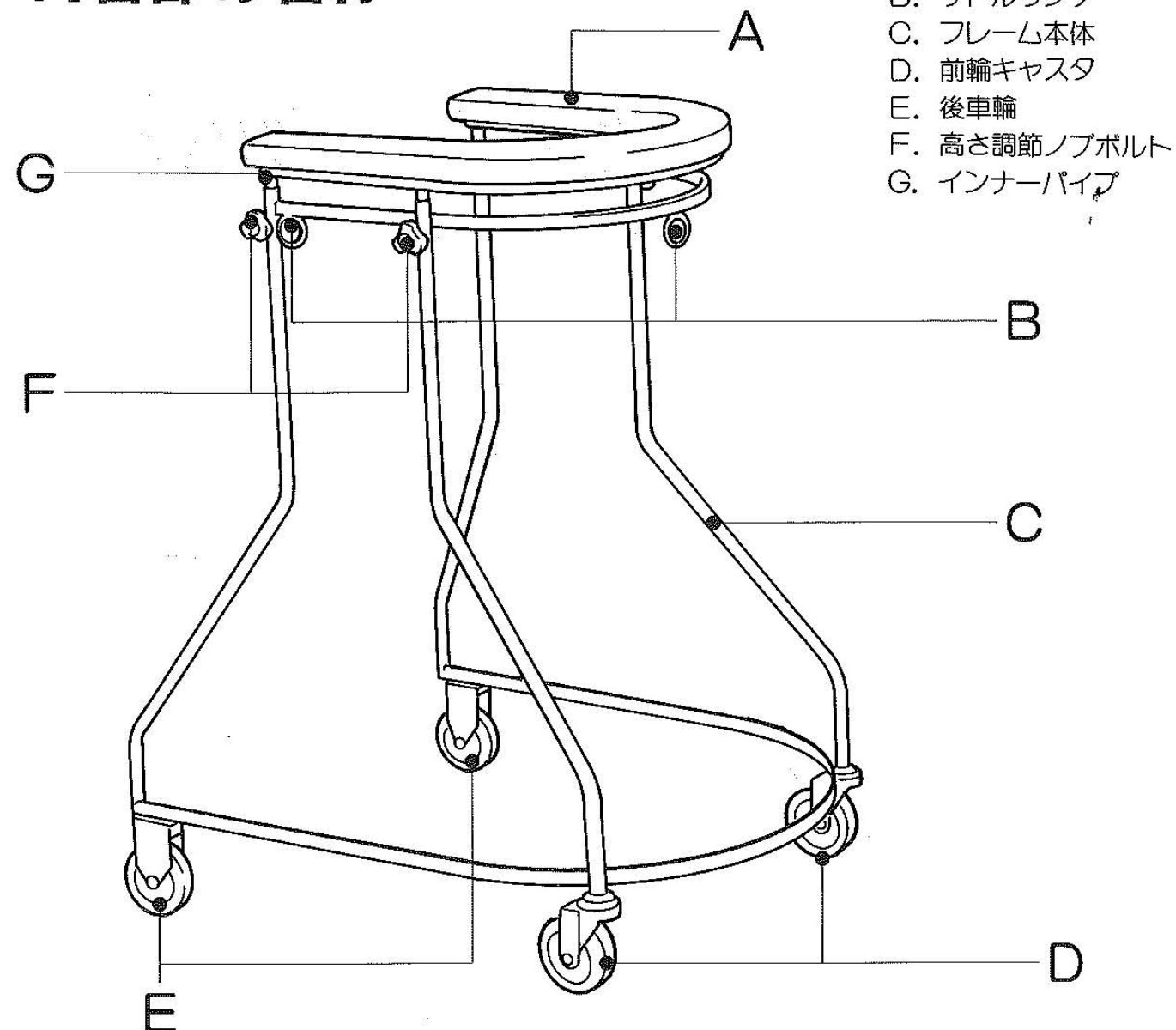

2.梱包状態

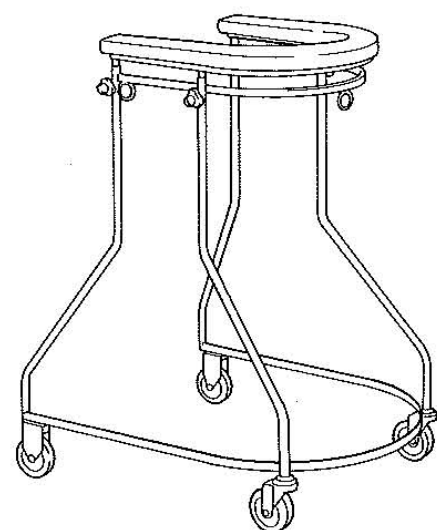

- ご使用まえに
このたびは当社の歩行器をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用まえに製品のご確認をお願いします。
- ①梱包材（エアークラフト）の破損がないかご確認ください。
- ②フレームのゆがみ、キズ、馬蹄の破損及びボルト、ナットのゆるみがないかご確認ください。
- ③A～Gまでの部品が異常なく取付いているかご確認ください。もし異常があれば販売店又は松永製作所にご連絡ください。

3.ご使用方法とご注意


◆マヒや骨折等、各種症状により歩行能力の低下した人が、歩行訓練や歩行補助車としてご使用いただく場合には、症状や身体状況にあわせて馬蹄の高さを調節して、能力に適した速度で十分に注意してご使用ください。なお屋外での使用には適しません。室内の平坦な場所でご使用ください。

1.〔馬蹄の高さの合わせ方〕


フレーム本体上部4ヶ所の高さ調節ノブボルトを少しゆるめて、適当な高さのところで一旦インナーパイプを仮締してください。

2.

後車輪うしろに自然な姿勢で立ち、安定した状態で馬蹄の上に手を置き、馬蹄を握る姿勢が標準です。病状や症状の軽い、重いまた脚力や腕力、握力の強い、弱いを十分に考慮して馬蹄の高さを決めてください。病院等で医師、理学療法士、専門家のアドバイスを受けてください。

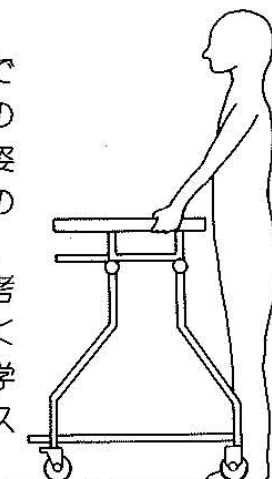


3. 位置が決まったら高さ調節ノブボルトを強く締めて固定してください。

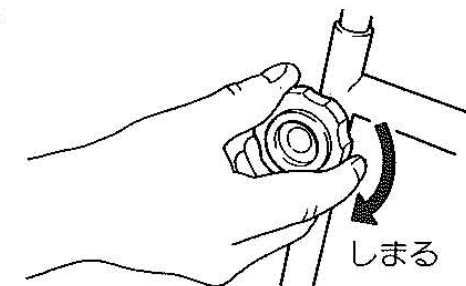

4. 歩行補助の目的以外には使用しないでください。

◆荷物の運搬や、乗用として使用すると破損の原因になります。

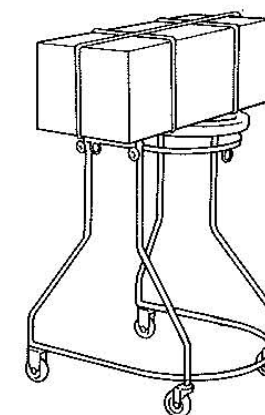


⚠注意 強く締まっていないと不意に動いて転倒の原因になります。


5. 段差のある所や階段、坂道、一般道では使用しないでください。

◆転倒の原因になります。

⚠警告

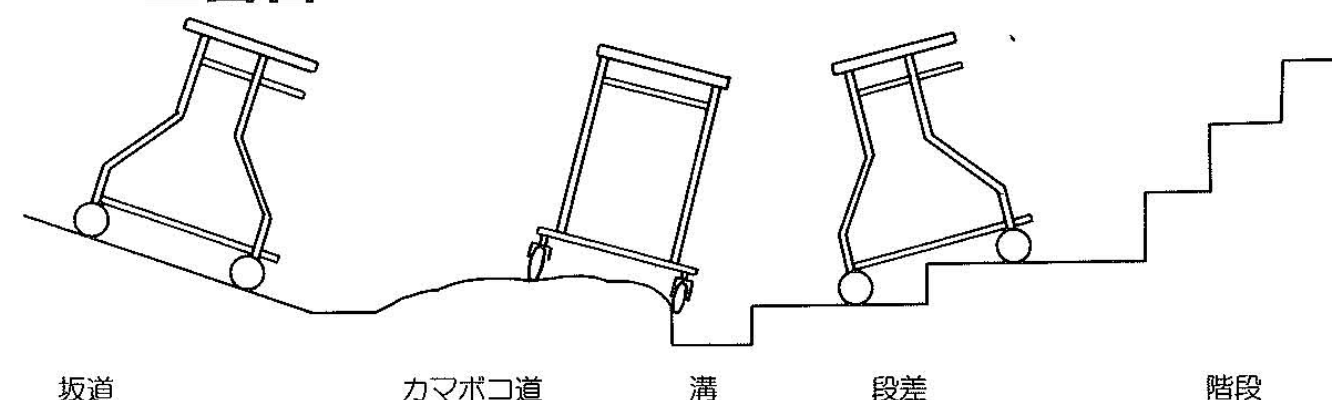


6. 馬蹄の中央より前方に体重がかかる場合は、前に転倒する恐れがあるので腰を低くして転倒に注意してください。

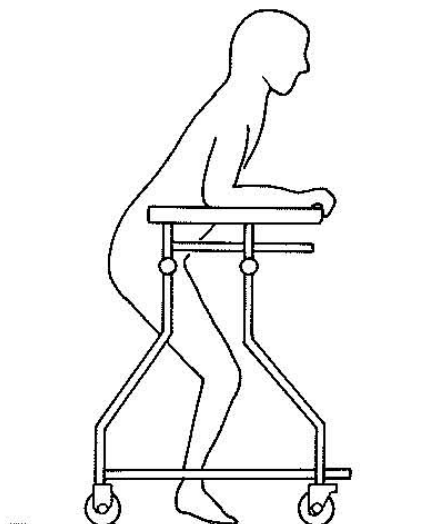

⚠️ 注意

極度に前方に重心がある場合は転倒の原因となります。


7. 直射日光やストーブ等による加熱に注意してください。

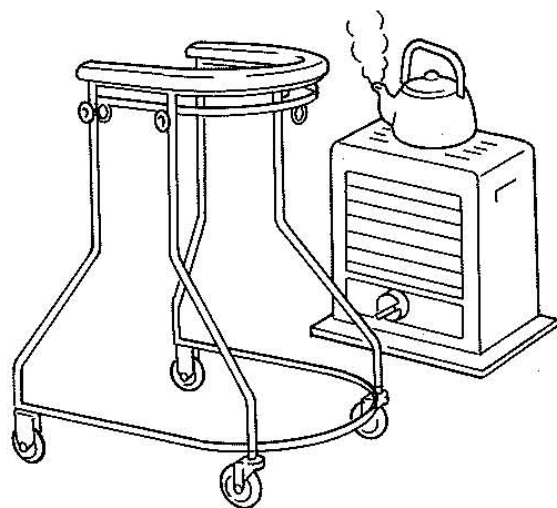

⚠️ 注意

馬蹄が燃えたり、パイプの加熱によってやけどをする原因になります。

8. 浴室やシャワー等水にぬれる場所や滑りやすい場所では使用しないでください。

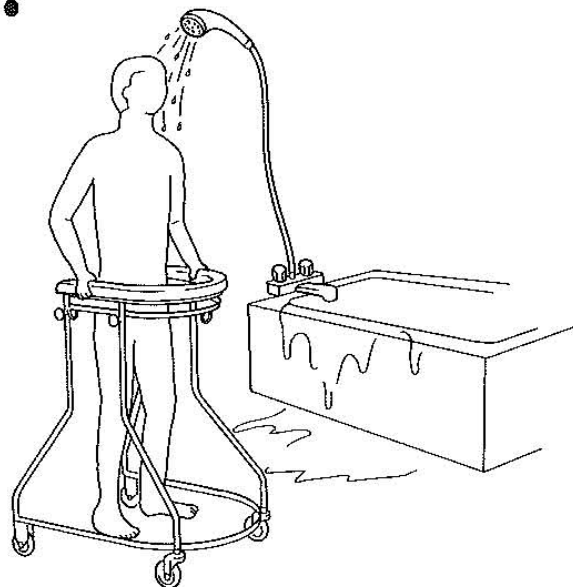

◆馬蹄の破損や、フレーム及び回転部分、車輪のサビなど故障の原因となります。

4. お手入れのしかた

■本体・馬蹄


本体のお手入れは、台所洗剤に浸した柔らかい布でふきとり、空ぶきをしてください。

- 変質・変色防止のために下図のようなものなどは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際はその注意書に従ってください。



■車輪

車輪のお手入れは、布でよごれやゴミを取って潤滑油を回転部分に注油してください。

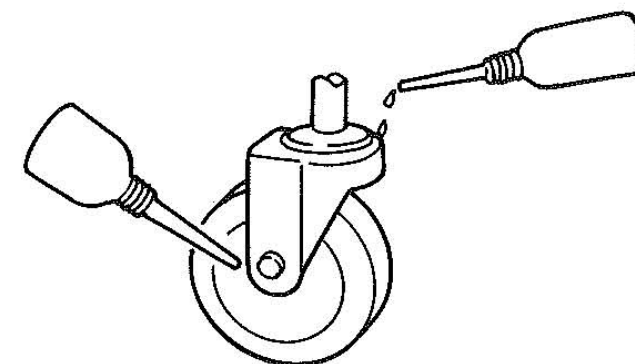


5. 仕様／別売品 (お買い上げの販売店でお求めください)

SM-20	馬蹄内々巾	馬蹄内奥行	全 高	全 巾	全 長
大	350mm	470mm	960~1200mm	680mm	830mm
中	320mm	430mm	800~1040mm	620mm	760mm
小	260mm	390mm	650~ 820mm	590mm	670mm

塗装色 {シルバー} 馬蹄色 {茶} 前後輪 {4インチ}

基準寸法以外のものやガードル架、ボンベ架、変形馬蹄、ブレーキ付、抵抗器付、ウエイト付、足交差防止バー付等はオーダーメイドでお作りします。

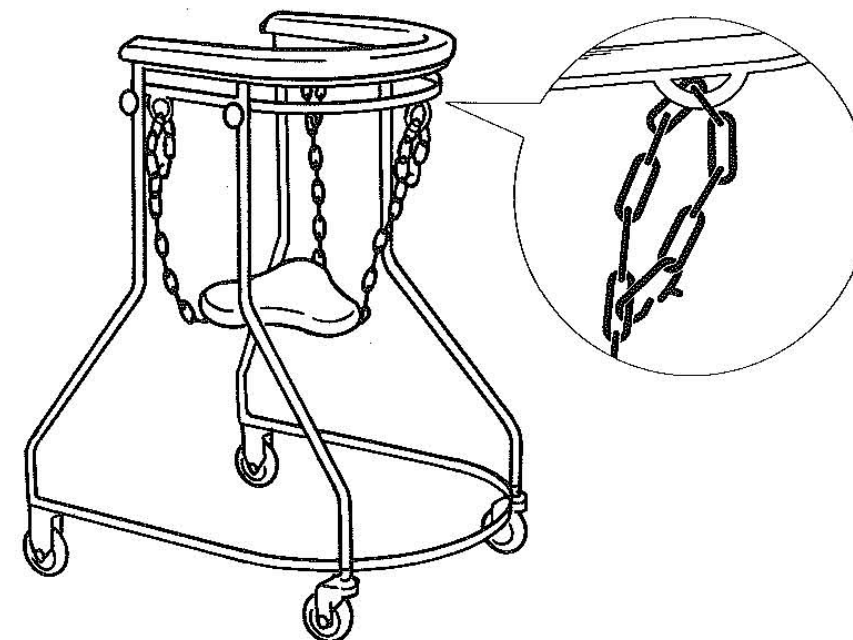

別売品 サドル

取付けはサドルリングにクサリを通し、サドルに座って足が地面に接地する高さに合わせて、クサリの先端に付いている金具をクサリにひっかけてください。

⚠️ 注意

クサリの長さを均一にして金具の固定を確認してください。